


Kap 22.3 Pumpar med variabelt flöde och bolus

Ibland vill man kunna variera flödes hastigheten och även kunna ge bolus. Vi har pumpar för alla behov.

Select-A-Flow, pumpar med variabelt flöde ska bäras utanpå kläderna och förvaras i rumstemperatur.

Select-A-Flow

| | | |
|---------|--------|-----------|
| PSAF01 | 270 ml | 1-7 ml/h |
| CBI004 | 400 ml | 2-14 ml/h |
| CBI6004 | 600 ml | 2-14 ml/h |

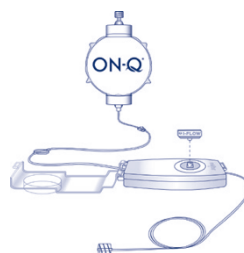


Fast flöde + Bolus

| | | |
|--------|--------|----------------------------|
| CBI003 | 400 ml | 5 ml/h + 5 ml bolus/60 min |
|--------|--------|----------------------------|

Select-A-Flow + Bolus

| | | |
|---------|--------|----------------------------------|
| CBI005 | 400 ml | 1-7 ml/h + bolus 5 ml/60 min |
| CBI006 | 400 ml | 2-14 ml/h + bolus 5 ml/30 min |
| CBI6007 | 600 ml | 1-7 ml/h + 1-7 ml/h (2 katetrar) |

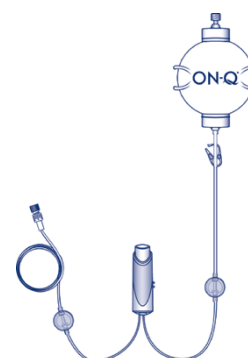

| | | | |
|---------------------------------|-----|-----|-----|
| Nominell påfyllningsvolym (ml) | 270 | 400 | 600 |
| Maximal påfyllningsvolym (ml) | 335 | 550 | 750 |
| Residualvolym (ml) | ≤11 | ≤16 | ≤23 |
| Kylskåp till rumstemperatur (h) | 12 | 15 | 18 |

Dosering/dygn:

| Select-A-Flow | Läkemedelskoncentration (mg) | | |
|---------------|------------------------------|-----------|---------|
| | 2 mg/ml | 2,5 mg/ml | 5 mg/ml |
| Max 7 ml/h | 336 | 420 | 840 |
| Max 14 ml/h | 672 | 840 | 1680 |

Fyll inte på för lite i pumpen! Det kan avsevärt höja flödes hastigheten. Vid fyllning till nominell volym är infusionsprecisionen ±15 % (95 % konfidensintervall).

Att fylla till lägre volym ger snabbare flöde, större volym ger långsammare flöde.