

EPILATOR EP 101

Art nr: 125006

Epilatorn används för borttagning av oönskad hårväxt och för koagulering av vävnad med hjälp av en växelström av hög frekvens.

Garanterar en antiseptisk, effektiv och nästan smärtfri behandling samt att den motverkar blödning genom koagulering av vävnad.

Teknisk specifikation:

- Strömförsörjning 220V, 50 Hz
- Effekt 40 W
- Frekvens 2,7 MHz
- Storlek 220x150x65 mm
- Vikt ~1,5 kg




Tillbehör:

- Pedal
- Nålhållare

Att förbereda Epilatorn:

- Sätt i strömkabeln i ett jordat uttag.
- Sätt i kontakten för pedalen bak på Epilatorn.
- Sätt i kabeln för nålhållaren fram på Epilatorn.
- Vrid nålhållaren moturs för att sätta kunna sätta i nålen.
- Sätt i nålen och vrid nålhållaren medurs för att fastsätta nålen.

Frontpanel

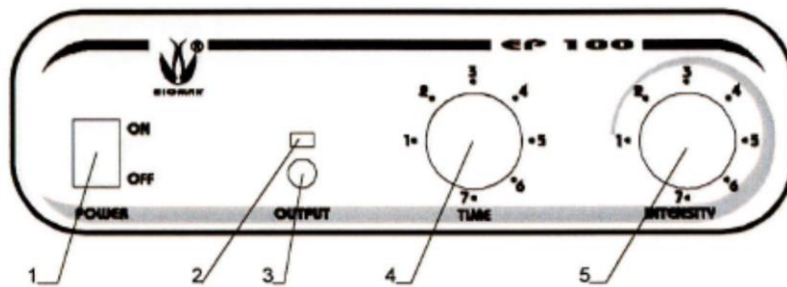

- 1) På/Av knapp
- 2) Behandlings indikator
- 3) Kontakt för nålhållaren
- 4) Vred för att reglera tiden för strömflödet.
- 5) Vred för att reglera strömmens intensitet.

Förberedelse inför behandling:

- 1) Innan behandlingen, rengör huden grundligt och desinficera behandlingsområdet.
- 2) Sätt på apparaten med På/Av knappen
- 3) Reglera intensiteten i förhållande till vilken behandling du ska genomföra samt kundens individuella förmåga. Reglera även tiden för strömflödet.
- 4) Sätt i nålen i hårfollikeln och sätt på strömmen genom att trycka på pedalen en kort gång. Håll ej nere pedalen. Apparaten är redan inställd på hur lång tid strömmen ska flöda. Nedtryckningen av pedalen sätter endast igång nedräkningen av tiden som är förinställd. Lampan kommer att tändas och indikerar på att strömmen flödar. Strömmen flödar så många sekunder som du har förinställt sedan tidigare på vredet (se frontpanelen nr 4).
- 5) Efter att epileringen är genomförd, ta ut nålen och håret kan lätt tas ut.

Om du vill avbryta behandlingen mitt i nedräkningen av tiden, kan du kort trycka ned pedalen igen.

Varning!

För att undvika skador på huden:

- justera intensiteten och behandlingstiden i enighet med kunden.
- var noga med att sätta i nålen precis i hårkanalen för att undvika ytliga brännskador på huden.
- sätt på strömmen endast då nålen har träffat hårsäcken.
- tala om för kunden att undvika att exponera det behandlade området för solen i minst 24 timmar efter behandlingen.

Att tänka på vid användandet av Epilatorn:

- Koppla alltid apparaten i ett jordat uttag.
- Om apparaten faller och får ett hårt slag skall den skickas in till en auktoriserad verkstad för kontroll.
- Försök till att själv laga, eller öppna upp höljet på apparaten, eller att byta det interna systemet är förbjudet.

Comet Norden AB

Box 156
241 22 Eslöv

Telefon: 0413 – 605 28
E-mail: info@comet.nu
Webbsida: www.comet.nu

- Att öppna upp höljet på apparaten eller att själv försöka att laga en defekt apparat, leder till att garantin slutar gälla och producenten inte kan garantera att apparaten fungerar korrekt.