



# DAX Ytdesinfektion Plus

## Ytdesinfektion



DAX Ytdesinfektion Plus består av ca 45 vol% isopropylalkohol samt tensid (smutslösande) och är avsedd för desinfektion av släta ytor, t.ex. undersökningsbriksar, bänkar och bord. Produkten är effektiv mot bakterier, svamp och höljeförsedda virus som t.ex. Corona, Hepatit b & C samt HIV. Verkar snabbt och avdunstar utan att lämna spår på den behandlade ytan.

Mikrobiologisk information:

EN13727 (baktericidal effekt) 30 sek

EN13697 (baktericidal/jästicidal effekt) 60 sek

EN13624 (jästicidal effekt) 30 sek

EN14476 (Vacciniavirus/höljeförsedda virus) 30 sek, (Adenovirus 5 min)

EN14348 (mycobactericidal effekt) 60 sek

Desinfektionsmedel BPR-reg. nr. 5654-1-3. Verksamma ämnen och biocidprodukt är godkända enligt biocidförordningen (Förordning (EU) nr 528/2012).

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

**Användningsområde** Lämplig för ytdesinfektion inom hälso- och sjukvården, tandvården eller djursjukvården.

**Produktegenskaper** Består av ipa och har 45 volymprocent alkoholstyrka  
Verkar snabbt och avdunstar utan att lämna spår efter sig på den behandlade ytan  
Tillsatsen av tensid som smutslösare gör att ytan inte behöver förbehandlas  
God upplösande effekt på t.ex. spill av blod

**Bruksanvisning** Används på ytor som tål alkohol. Tillsatsen av tensid gör att ytan inte behöver rengöras först.  
Innehåller inte castor oil.

Gör så här:

1. Spruta rikligt på ytan alternativt dränk in en torkduk med utspädd vätska.
2. Bearbeta ytan upprepade gånger under minst 30 sek (se etiketten för kontakttider)
3. Lämna ytan att lufttorka

**Sammansättning**

**Aktiva ämnen**

**Effekt**

Isopropanol

45vol%

Med tensid

**pH koncentrat**

8.5 svagt alkaliskt

**Förvaring**

Förvaras i rumstemperatur, stäng kapsylen efter användning. Hållbar 3 år från produktion.

**Tillverkningsland**

DANMARK