



Överraskande starkt

G-ænial®  
Universal  
Injectable  
från GC

Komposit med  
hög hållfasthet


**GC**

G-ænial® Universal Injectable från GC

# Överraskande starkt

Applicera direkt!

## För alla kavitetklasser Täckande skikt behövs inte

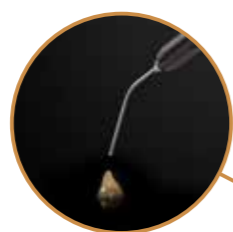

Perfekta materialegenskaper: helt kontrollerbart flöde såväl vid applicering som vid sprutspetsens avlägsnande.



Böjbara spetsar underlättar åtkomst till alla kaviteter




Materialet rinner inte iväg utan blir kvar där du applicerat det.

Enkel applicering och bekvämt grepp.

252 Al % röntgenkontrast för optimal uppföljning.

Dr Anthony Mak, Australien

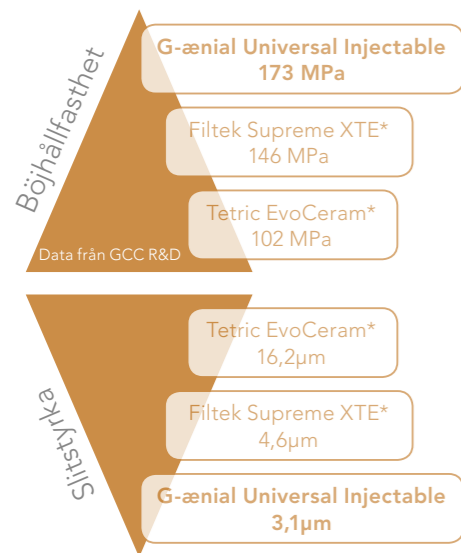

Ultrafina fillerpartiklar av barium (150 nm) och hög fillermängd.

FSC-teknologi (Full-coverage Silane Coating) förbättrar fördelning och vidhäftning av fillermaterial i matrix.

Exceptionella egenskaper.  
Kladdar inte.  
Enkelt att applicera.  
Hög radiopacitet.

\*Varumärken som inte tillhör GC.



## Klass II-restauration



Ursprunglig situation med approximal karies.



Den gamla restaurationen och karies avlägsnas.



Underskår kan enkelt nås med de böjbara spetsarna.



Approximalytan byggs upp med emalfärgen JE.



Matrisen avlägsnas efter att ytan byggts upp.



En klass I-procedur kan nu påbörjas: dentinskiktet skapas med färgen A4.



Applicering av slutgiltigt emaljskikt med färgen JE.



Slutgiltigt resultat efter finishering och polering av kantanslutningarna.

Dr Javier Tapia Guadix, Spanien

## Klass III-restaurationer



Ursprungliga klass III-kaviteter.



Applicering med G-ænial Universal Injectable (A2).



Resultat direkt efter behandling.



Perfekt integrering vid återbesök.

Dr Ahmed Al-Jaff, Irak

# G-ænial® Universal Injectable från GC

## Överlägsen estetik och bestående höggglans!



Dr Floriann Klumpp, Tyskland



Dr Ali Salehi, Frankrike

	Standardfärger											Dentinfärger			Emaljfärger	
	XBW	BW	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	CV	CVD	AO1	AO2	AO3	JE	AE
Spruta 1 ml (1,7g)	901471	901472	901473	901474	901475	901476	901477	901478	901479	901480	901481	901482	901483	901484	901485	901486



901503 - Långa applicerings-spetsar (30 st.)



### Upptäck även GC:s universalbonding G-Premio BOND

- 009030 – G-Premio BOND, kit 5 ml
- 009036 – G-Premio BOND, flaska, refill, 5 ml
- 009032 – G-Premio BOND, 3 flaskor, refill, 3 x 5 ml
- 009034 – G-Premio BOND Unit Dose, 50 st.

**GC EUROPE N.V.**  
 Head Office  
 Researchpark  
 Haasrode-Leuven 1240  
 Interleuvenlaan 33  
 B-3001 Leuven  
 Tel. +32 16 74 10.00  
 Fax. +32 16 40 48 32  
 info.gce@gc.dental  
 http://www.gceurope.com

**GC Nordic AB**  
 Strandvägen 54  
 S-193 30 Sigtuna  
 Sweden  
 Tel:+46 768 544 350  
 info.nordic@gc.dental  
 http://nordic.gceurope.com



**DENTHOUSE** 

www.denthouse.se  
 08 - 471 70 50