


Bruksanvisning till Orthospray

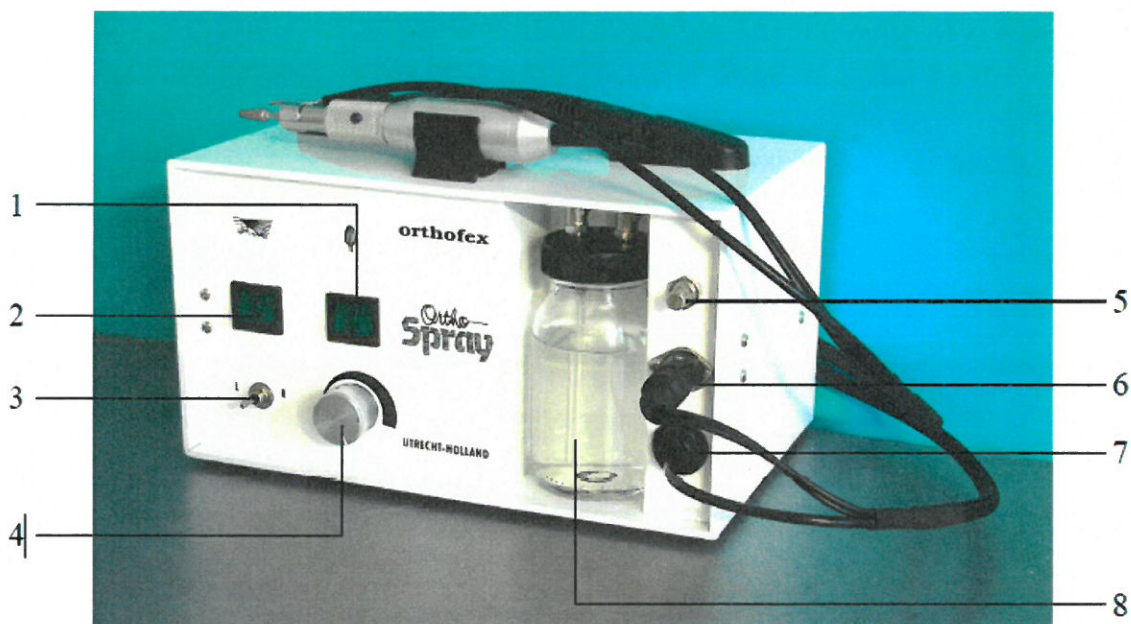

- 1) Huvudströmbrytare
- 2) Strömbrytare spray
- 3) Höger/vänster varv
- 4) Hastighetsreglage
- 5) Volymreglage
- 6) Kontakt till handstycket
- 7) Koppling till vattenslang
- 8) Avtagbar tank

Som en professionell pedikyrmaskin erbjuder den uppgraderade Ortho-Sprayen med avtagbar tank många fördelar för såväl pedikyristen som klienten.

Användningen av Ortho-Spray säkerställer ett hygieniskt arbetssätt.

Den justerbara sprayen säkerställer smärtfri behandling och behaglig kylning av områden som ska behandlas.

Dammpartiklarna som uppstår fäster sig vid de små dropparna (dimma).

Klienten upplever detta behandlingssätt som avslappnande och uppfriskande.

Genom att dra behållaren (8) mot dig kan du skruva loss tanken och fylla den med Spraymasterlösning.

Genom att använda andra vätskor upphör ditt anspråk på garantin.

Se till att behållaren är tätt stängd; detta förhindrar tryckförlust, vilket säkerställer korrekt dimma av sprayen.

Vätskeslangen och pluggen på handstycket fästs på enheten enligt följande. För det första måste du

ta vätskeslangen och tryck in denna i anslutningen (7) tills du känner att den inte kan gå längre in. Elpluggen (6) kan bara sättas i på ett sätt, och det är med den blanka biten vänd uppåt. För att ta bort vätskeslangen håll in den svarta ringen som sticker ut och är lite rörlig, först då kommer du kunna koppla loss slangen.

Under transport är det alltid lämpligt att koppla bort handstycket för att förhindra att slang och sladd skadas.

BRUKSANVISNING FÖR ORTHO-SPRAY

1 Kontrollera din egen anslutningspunkt

2 Kontrollera att huvudströmbrytaren är av. Först ska du nu montera en slipbits i handstycket enligt bruksanvisningen för handstycke, som medföljer separat.

Huvudströmbrytaren (1) trycks nu in och med hjälp av inställningsratten (4) kan varvtalet justeras. Med omkopplaren (3) kan du justera önskad rotationsriktning.

Omkopplaren (2) trycks sedan in för att slå på sprayen och med justeringsratten (5) kan du justera sprutmängd. Medurs är mindre och moturs är mer. Notera, det tar några sekunder innan spraysystemet bygger upp tillräckligt tryck. Om spraydimman är rätt inställd kommer den inte att behövas justeras igen om maskinen stängdes av och sedan på igen.

Vad måste jag göra om min maskin inte reagerar alls?

Kolla säkringen på baksidan (svart lock) och byt ut denna vid behov. Vid köp av maskinen medföljer 1 extra glassäkring i påsen som innehåller gummihattor.

Vad måste jag göra om mitt handstycke inte fungerar?

1 Kontrollera om du har satt i kontakten (6) korrekt.

2 Kontrollera om strömbrytaren (1) är påslagen. (Omkopplaren lyser om den är påslagen)

3 Handstycket är också skyddat med en automatsäkring. Om den har slagit till så lyser inga lampor (lilla blå lampan bakom tanken) (8) kommer också att stängas av. Om säkringen fungerar måste du stänga av maskinen och vänta ett par minuter så ska det starta igen.

4 Kontrollera om varvknappen (4) inte är helt avstängd

Vad måste jag göra om min spray inte fungerar eller om den inte fungerar bra?

1 Kontrollera om omkopplarna (1) och (2) inte är avstängda.

2 Kontrollera om tanken (8) är ordentligt stängd.

3 Kontrollera om sprayregulatorn (5) inte är stängd.

4 Spraymunstycket som är fäst på handstycket (där spraydimman kommer ut) inte är igensatt. Du kan torka rent eller blåsa det med tryckluft om det behövs.

Maskinunderhåll

Som tillverkare och serviceställe av Orthofex-maskinerna rekommenderar vi en service en gång per år.

Erfarenhetsmässigt kan alltså din maskins förväntade livslängd förlängas med ca. 10 år.

Orthofex rengöringstips

Rengör aldrig din maskin med alkohol, använd vanlig multirengörare. Detsamma gäller för handenheten. Men använd så lite som möjligt. Den tandade säkringsmuttern på handstycket bör hellre rengöras

med hjälp av en slipborste.

Bruksanvisning för handstycke

Sätta in och byta borr (se även ritning nedan)

Se till att bormotorn är avstängd innan du sätter i eller byter borr. Motorn får endast slås på när borrar har satts i och låsts fast korrekt. Om detta inte är gjort, kommer en automatisk säkring att reagera och handstycket fungerar inte.

Genom att vrida den räfflade hylsan åt höger öppnas chucken så att borrar kan vara

Sätts i. (Se till att borrar skaft är rent och torrt innan det sätts in.) Vrid tillbaka den räfflade hylsan åt vänster, chucken stängs och borrar säkras.


Innan du sätter i borrar, sätt på en av gummihättan över borraraxeln.

Borret säkras sedan enligt beskrivningen ovan. Avståndet mellan gummihättan

och handenheten bör vara 2-3 mm så att borret roterar fritt

utan att gummihättan vidrör handstycket.

Detta för att förhindra att damm och fukt tränger in i kullagren.

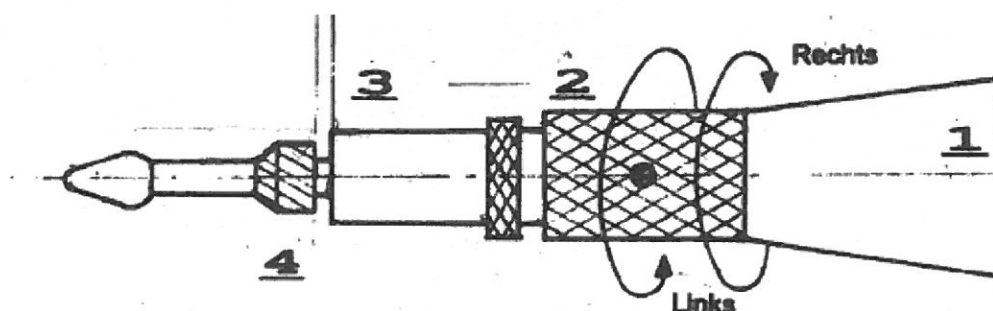

Ytterligare viktiga punkter

- * Tappa inte handstycket
- * Borr med en diameter på mer än 8 mm får inte användas.
- * Använd inte olja eller annat smörjmedel i handstycket och enheten.
- * Använd inte tryckluft för att rengöra handstycket eftersom det kan blåsa in smuts i handstycket
- * Orthofex rekommenderar att handstycket och enheten servas en gång om året, ring oss innan 040-416400.

- * Använd alltid gummihättorna för att förhindra att fukt tränger in i kullagren

Garantin upphör att gälla om du inte följer dessa regler