




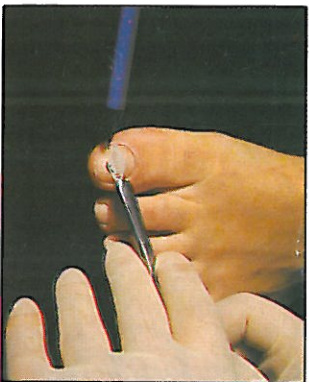


3. Markera på CLIP PLATTAN

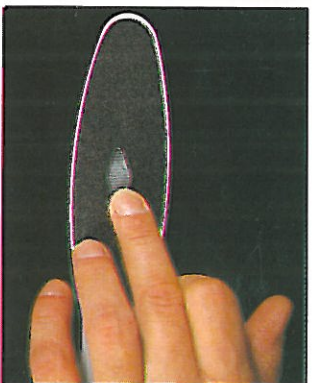

4. Fila ena sidan av CLIP PLATTAN

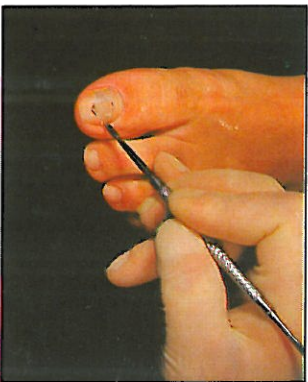

9. Tryck fast på mitten, sedan mot kanterna

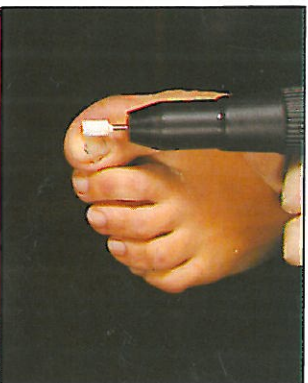

10. Fila kanterna lätt

FASTSÄTTNING AV CLIP PLATTAN (se fig.)

Det är enkelt att sätta fast CLIP PLATTAN. Först slipas nageln något och kanterna förbereds. Detta är **ALLTID** nödvändigt. När detta är gjort väljer man en CLIP PLATTAN i passande storlek bland de fem som medföljer.

CLIP PLATTAN bör täcka nagelytan utan att sticka ut. I varje fall bör den täcka till 1 mm från varje sida.

Såväl nagel som CLIP PLATTAN bör fuktas med aceon utan olja för att få bort eventuella fettrester och smutspartiklar.

CLIP PLATTAN lägges på nageln och markeras i mitten med en byerts.


Därefter lägges en 1/2 droppe lim på den markerade ytan och CLIP PLATTAN lägges på.

När CLIP PLATTAN väl är fast, tar man en 1/2 droppe lim på spateln och anbringar på CLIP PLATTAN:s nedre sida. Med spatelns andra ände pressar man så ned i ca. 10 sekunder.


Proceduren upprepas sedan på den andra sidan.

Det är av stor vikt att hela ytan på CLIP PLATTAN ligger väl an mot nageln.

Som sista åtgärd slipar man kanterna lätt på CLIP PLATTAN, för att undvika sprickbildningar och oregebundheter.

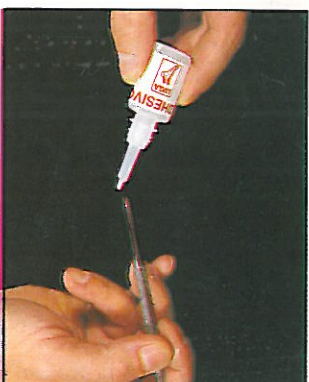

5. En 1/2 droppe lim

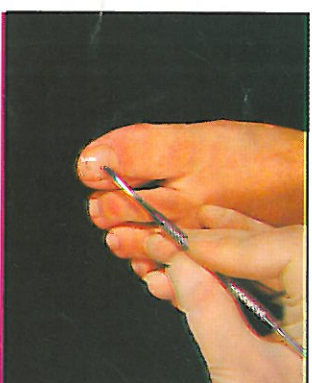

6. Limmet sättes på nageln

OM DET MISSLYCKAS?

1. CLIP PLATTAN fastnar inte, varför?

A. Man har väntat för länge med att sätta på den. Vänta högst 2-3 sek.

B. Nageln har inte rengjorts tillräckligt.

C. Nagelytan har inte filats ordentligt.

D. Limmet är för gammalt.

E. För mycket lim har använts.

2. För mycket lim.

Limmet har egenskapen att utveckla en värmeeffekt. Om för mycket lim används blir denna värmeeffekt så stor att molekylärstrukturen hos CLIP PLATTAN försvagas, vilket direkt försämrar kvaliteten.

3. För lite lim.

Det är likaledes fel att använda för sparsamt med lim, eftersom CLIP PLATTAN då ej fastnar ordentligt utan lossnar i kanterna då det ej kunnat pressats fast tillredställdande.

4. Bristfälligt lim kan bero på.

A. Flaskan har inte varit väl tillsluten.

B. För tørt i flasköppningen.

C. Flaskan har utsatts för starkt ljus.


D. Flaskan har utsatts för intensiv värme.

5. VIKTGT! Förvara alltid limmet i kylskåp eller i svalt utrymme och ha alltid flaskan stående.

FÖRDELAR MED SYSTEMET


Den huvudsakliga fördelen ligger i utformningen, som framtogs och utvecklats för att på effektivaste och minst obehagliga sätt korrigera nagelns linjer på så sätt att patienten lider minsta möjliga obehag och så att fotvårdaren kan arbeta på snabbast, smidigast och effektivast möjliga sätt.

Tack vare sin utformning drar CLIP PLATTAN ut nagelkanterna så att det skadade partiet behandlas i sin helhet och inte punktvís, så som ofta blir fallet med andra system. Utformningen tillåter att man enkelt kan markera skadans exakta läge, vilket direkt resulterar i snabbhet och effektivitet vid infästningen.

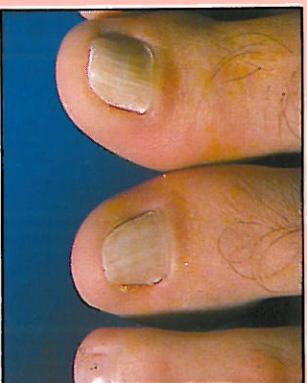


Före behandling med
LUGA CLIP SYSTEM

VERKLIGA RESULTAT

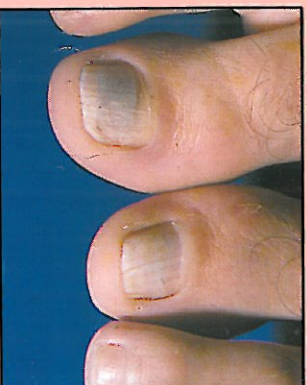


Efter behandling med
LUGA CLIP SYSTEM


LUGA förbehåller sig rätten att utföra modifierationer i syfte att förbättra produkten ytterligare.

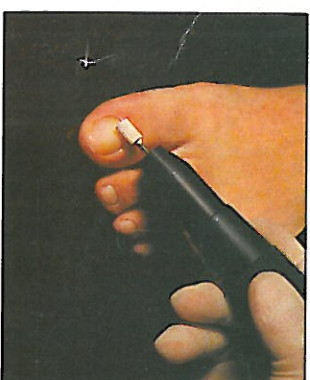


1. Putsa nageln

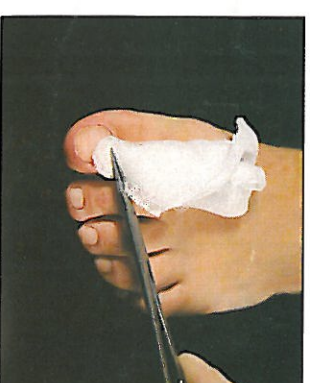

2. Avfetta nageln

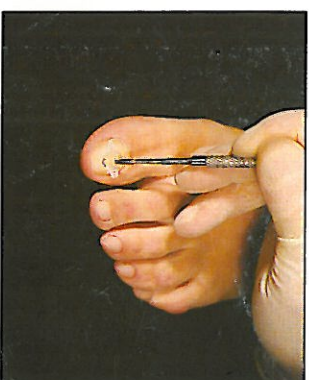

7. Tryck ned mitten av
CLIP PLATTAN

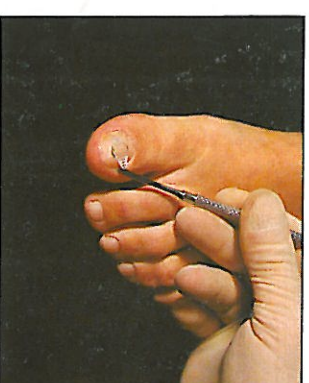

8. Limbestyk kanterna på
CLIP PLATTAN

KORRIGERING AV NAGLAR UTAN KIRURGISKT INGREPP

LUGA CLIP SYSTEM är ett nytt system för nagelvård, som gör det möjligt att förstärka behandlingseffekten vid invuxna naglar, speciellt genom en icke blodig behandling av angripna naglar, överkänslig nagelbädd, varbildningar och nageltrång.

CLIP gör anbringandet av hakar i nagelkanten onödigt.



UTFÖRANDE

LUGA CLIP PLATTAN har framtogs i ett specialmaterial, vars egenskaper är att behålla sin ursprungliga form när CLIP PLATTAN fästes på nageln och att anpassa sig efter dennes deformation. Då materialet strävar efter att återta sin ursprungliga form, drar den upptrån nagelbandet åt sidan.