

Oxivir Excel

Ytdesinfektion



Oxivir Excel är en bruksfärdig lösning för rengöring och desinfektion av ytor. Produkten är effektiv mot ett brett spektrum av mikroorganismer och den patenterade AHP-formulan ger en kortare kontakttid jämfört med vanlig väteperoxid. Kan användas på hårda, icke porösa ytor samt non-invasiv medicinteknisk utrustning. Bör ej användas på material som är känsliga för vatten och syra (t.ex. mässing, aluminium och galvaniserat stål). Undvik blandning med andra produkter.

Användningsområde

Oxivir Excel är framtagen för daglig desinfektion inom hälso- och sjukvården samt dental och veterinärsektorn och är även lämplig till slutstädning.

Produktegenskaper

Fullständig virucid effekt. Effektiv mot bakterier, jästsvamp och virus.
Snabb desinfektion med realistiska kontakttider.
Säker för både användare och ytor.
Verksamma ämnen bryts ner till vatten och syre.
Tensiderna i produkten är lätt nedbrytbara enligt Tvätt och Rengöringsmedelsförordningen (EC 648/2004).
Kan användas på ytor som tål vatten och syra.
Ingen eftersköljning behövs.
CE-märkt och kan användas på non-invasiv medicinteknisk utrustning.

Uppfyller följande EN-standarder:
EN13727 Bactericidal effect - 30 sec
EN16615 Bactericidal/Yeasticidal effect - 1 min
EN13624 Yeasticidal effect - 5 min
EN14476 Virucidal effect - 30 sec

Bruksanvisning

Bruksanvisning:
1. Handskar godkända enligt EN 374 bör användas.
2. Avlägsna stora mängder organiskt material först genom vanlig rengöring.
3. Spraya Oxivir Foam på ytan
4. Bearbeta ytan med en torkduk.
5. Säkerställ att ytan förblir fuktad under hela kontakttiden (se tabell).
6. Spraya på mer vätska om det behövs för att hålla ytan fuktig under hela kontakttiden,

Sammansättning

Aktiva ämnen

Hydrogen väteperoxid

Förpackningsvolym / Transport krt. Artikelnr.	Artikelnr.	GTIN	GTIN (krt)
6 x 750 ml	603057	7054956030577	7054957030576



Ytterligare information

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida www.kiilto.se eller genom att kontakta vår kundtjänst på info.klc.se@kiilto.com.