



# Kiilto Pro Ytdesinfektion Plus

## Ytdesinfektion



Kiilto Pro Ytdesinfektion Plus består av ca 45 vol% isopropylalkohol samt tensid (smutslösande) och är avsedd för desinfektion av släta ytor, t.ex. undersökningsbritsar, bänkar och bord. Produkten är effektiv mot bakterier, svamp och höljeförsedda virus som t.ex. Corona, Hepatit b & C samt HIV. Verkar snabbt och avdunstar utan att lämna spår på den behandlade ytan.

### Mikrobiologisk information:

EN13727 (baktericidal effekt) 30 sek

EN13697 (baktericidal/jästicid effekt) 1 min

EN13624 (jästicidal effekt) 30 sek

EN16615 (baktericidal/jästicidal effekt) 1 min

EN14476 (Vacciniavirus/höljeförsedda virus) 30 sek, (Adenovirus 5 min)

EN14348 (mycobactericidal effekt) 1 min (clean), 5 min (dirty)

Desinfektionsmedel BPR-reg. nr. 5654-1-3. Verksamma ämnen och biocidprodukt är godkända enligt biocidförordningen (Förordning (EU) nr 528/2012).

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Användningsområde</b> | Lämplig för ytdesinfektion inom hälso- och sjukvården, tandvården eller djursjukvården. Även lämplig för privat bruk.                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>Produktegenskaper</b> | Består av ipa och har 45 volymprocent alkoholstyrka<br>Verkar snabbt och avdunstar utan att lämna spår efter sig på den behandlade ytan<br>Tillsatsen av tensid som smutslösare gör att ytan inte behöver förbehandlas<br>God upplösande effekt på t.ex. spill av blod                                                                                    |                   |
| <b>Bruksanvisning</b>    | Används på ytor som tål alkohol. Tillsatsen av tensid gör att ytan inte behöver rengöras först.<br>Innehåller inte castor oil.<br><br>Gör så här:<br>1. Spruta rikligt på ytan alternativt dränk in en torkduk med utspädd vätska.<br>2. Bearbeta ytan upprepade gånger under minst 30 sek (se etiketten för kontakttider)<br>3. Lämna ytan att lufttorka |                   |
| <b>Sammansättning</b>    | <b>Aktiva ämen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Effekt</b>     |
|                          | Isopropanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 45vol% Med tensid |
| <b>pH koncentrat</b>     | 8.5 svagt alkaliskt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |

**Förvaring** Förvaras i rumstemperatur, stäng kapsylen efter användning. Hållbar 3 år från produktion även i öppen flaska förutsatt att produkten förvaras enligt anvisningar. Utgångsdatum står tryckt på flaskan.

**Tillverkningsland** SVERIGE

| Förpackningsvolym /<br>Artikelnr. | Transport krt. | Artikelnr. | GTIN          | GTIN (krt)    |
|-----------------------------------|----------------|------------|---------------|---------------|
|                                   | 12 x 1 l       | 468-12     | 7331964004685 | 7331964904688 |
|                                   | 3 x 5 l        | 469-3      | 7331964004692 | 7331964904695 |
|                                   | 24 x 300 ml    | 461-24     | 7331964004616 | 7331964904619 |



**Ytterligare information** Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida [www.kiilto.se](http://www.kiilto.se) eller genom att kontakta vår kundtjänst på [info.klc.se@kiilto.com](mailto:info.klc.se@kiilto.com).