

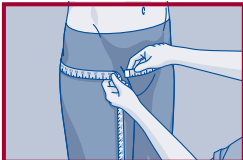
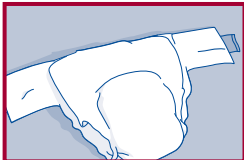
Attends® Adjustable



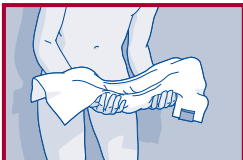


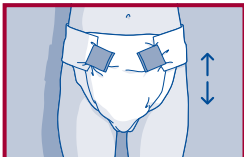
Användarinstruktion

Attends Adjustable gör det möjligt att på bästa möjliga sätt fixera produkten för att möta användarens behov. Följande tre sätt att fixera produkten fungerar också om användaren sitter eller ligger ner.

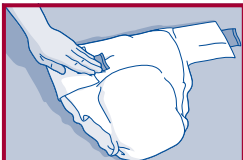
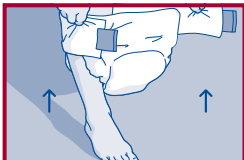

Förberedelser

-  Mät höft och midjemått och välj det största måttet för att hitta rätt storlek.
-  Öppna produkten helt och placera änden med kardborre/tejp mot ryggen och försäkra dig om att midjebanden är helt utvecklade och att det mjuka textilliknande baksidan är vänd utåt samt att det mjuka vita innerfodret är vänt in mot huden.

Skyddet öppet på båda sidorna

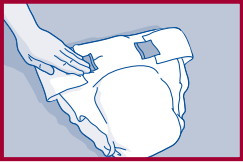
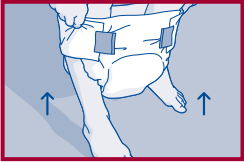

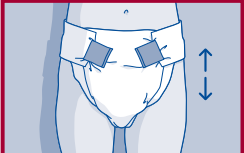
-  Vik och skålforma skyddet innan fixering.
-  Placera skyddet mellan benen så att det sitter bra på användaren och komfortabelt i grenen. Använd våtindikatorn som hjälp för att justera och centrera skyddet.
-  Dra försiktigt midjebandet mot skyddets framsida. Kardborren/tejpen kan fästas var som helst på skyddets framsida. Tryck fast kardborren/tejpen ordentligt för en säker fixering av skyddet.
-  Kardborren/tejpen kan justeras vilket är nödvändigt för att ge användaren en personlig passform. Kardborren/tejpen kan öppnas, justeras och återförslutas.

Skyddet öppet på ena sidan

-  Fäst kardborren/tejpen på en sida innan skyddet justeras.
-  Sätt i ena benet i skyddet, dra upp det i grenen och justera så att det sitter bekvämt. Använd våtindikatorn som hjälp för att justera och centrera skyddet. Alternativt kan du också fixera produkten runt benet och sedan följa instruktionerna ovan.
-  Dra försiktigt midjebandet mot skyddets framsida. Kardborren/tejpen kan fästas var som helst på skyddets framsida. Tryck fast kardborren/tejpen ordentligt för en säker fixering av skyddet.
-  Kardborren/tejpen kan justeras vilket är nödvändigt för att ge en personlig passform. Kardborren/tejpen kan öppnas, justeras och återförslutas.

Användarinstruktion Fortsättning...

Båda sidorna av skyddet fixerade

- 3**  Förfixera kardborren/tejpen löst på båda sidor innan justering av skyddet.
- 4**  Kliv i produkten som om det vore byxor och dra upp det i grenen och justera så att skyddet sitter bekvämt. Använd våtindikatorn som hjälp för att justera och centrera skyddet.
- 5**  Dra försiktigt midjebandet mot skyddets framsida. Kardborren/tejpen kan fästas var som helst på skyddets framsida. Tryck fast kardborren/tejpen ordentligt för en säker fixering av skyddet.
- 6**  Kardborren/tejpen kan justeras vilket är nödvändigt för att ge en personlig passform. Kardborren/tejpen kan öppnas, justeras och återförslutas.

Råd och Tips

Vid val av skydd

- Välj rätt storlek genom att utgå från höft och midjemått och välj det största måttet.

Vid läckage

- Kontrollera att du valt rätt storlek.
- Kontrollera att skyddet sitter bra.

Kassering av produkten

- Rulla ihop skyddet och släng det enligt gällande lokal avfallshänvisning.
- Spola inte ner skyddet i toaletten.

Fixering

- Vik på längden och skålforma skyddet försiktigt.
- Se till att materialet i ljumskarna ligger på utsidan av skyddet.
- Håll kardborren/tejpen mot ryggen när skyddet monteras - då vet du att det sitter på rätt håll.
- Använd våtindikatorn för att centrera skyddet på kroppen.
- Kardborren/tejpen kan fästas var som helst på produktens främre del. Tryck fast kardborren/tejpen ordentligt för en säker fixering av skyddet.
- Kardborren/tejpen kan justeras vilket är nödvändigt för att ge en personlig passform. Kardborren/tejpen kan öppnas, justeras och återförslutas.

Byte

- Kontrollera våtindikatorn - om våtindikatorn har försvunnit till mer än hälften av skyddets längd så behöver det bytas. Skyddet kan återförslutas om så inte är fallet.
- Återförslut och återanvänd skyddet vid toalettbesök om skyddet är rent och torrt.
- Fäst inte kardborren/tejpen på huden.
- Avlägsna använda skydd bakifrån om möjligt.
- Rengör huden enligt lokala föreskrifter. Rengör framifrån och bakåt.
- Undvik oljebaserade krämer om möjligt och använd aldrig puder eftersom det påverkar skyddets absorptionsförmåga vilket gör att urinen inte absorberas och huden utsatt för risk.

Attends® Adjustable



Attends Adjustable är testade och godkända av proDERM, institutet för dermatologisk forskning.

För mer information besök www.attends.se