

POOLLIFT INSTALLATION

4. Range of pool lift

Den bifogade tabellen ger en tydlig och enkel översikt över de situationer där poollyften kan användas i kombination med ett kroppsstöd / badstol baserat på följande faktorer:

- avståndet mellan uttaget och kanten på pool (A)
- vattennivån i förhållande till poolens övre kant (B)
- användarens position i förhållande till poolkanten (C):
standardvärde (minimum) = 15,75 tum / 40cm

A [inch / cm]	C [inch / cm]					
	B = 0	B = 3.94 inch / 10.00 cm	B = 7.87 inch / 20.00 cm	B = 11.81 inch / 30.00 cm	B = 15.75 inch / 40.00 cm	B = 19.69 inch / 50.00 cm
5.91 / 15.00	40.55 / 103.00	38.98 / 99.00	37.99 / 96.50	34.65 / 88.00	31.89 / 81.00	27.17 / 69.00
7.87 / 20.00	38.58 / 98.00	37.01 / 94.00	36.02 / 91.50	32.68 / 83.00	29.92 / 76.00	25.2 / 64.00
9.84 / 25.00	36.61 / 93.00	35.04 / 89.00	34.06 / 86.50	30.71 / 78.00	27.95 / 71.00	23.23 / 59.00
11.81 / 30.00	34.25 / 87.00	33.07 / 84.00	32.09 / 81.50	28.74 / 73.00	25.98 / 66.00	21.26 / 54.00
13.78 / 35.00	32.28 / 82.00	31.1 / 79.00	30.12 / 76.50	26.77 / 68.00	24.02 / 61.00	19.29 / 49.00
15.75 / 40.00	30.31 / 77.00	29.13 / 74.00	28.15 / 71.50	24.8 / 63.00	22.05 / 56.00	17.32 / 44.00
17.72 / 45.00	28.35 / 72.00	27.17 / 69.00	26.18 / 66.50	22.83 / 58.00	20.08 / 51.00	X
19.69 / 50.00	26.38 / 67.00	25.2 / 64.00	24.21 / 61.50	20.87 / 53.00	18.11 / 46.00	X
21.65 / 55.00	24.41 / 62.00	23.23 / 59.00	22.24 / 56.50	18.9 / 48.00	16.14 / 41.00	X
23.62 / 60.00	22.44 / 57.00	21.26 / 54.00	20.28 / 51.50	16.93 / 43.00	X	X
25.59 / 65.00	20.47 / 52.00	19.29 / 49.00	18.31 / 46.50	X	X	X
27.56 / 70.00	18.5 / 47.00	17.32 / 44.00	16.34 / 41.50	X	X	X
29.53 / 75.00	16.54 / 42.00	X	X	X	X	X

