



## Försiktighetsåtgärder som ska vidtas av Bassänglyften

1) Byt ut uttjänta/gamla batterier och försök inte ladda dem.

Batterierna når slutet av sin livslängd i följande situationer:

- 1) Laddningen tar längre tid (mer än 4 timmar)**
- 2) enheten inte har varit fulladdad på mer än 3 månader**
- 3) batterierna blir inte fulladdade av laddaren**
- 4) om batterierna laddas ur snabbare än normalt**

2) Ladda apparaten helt en gång i veckan med Handi-Move-laddaren

3) Koppla ur laddaren efter laddning och ladda inte i direkt solljus

4) Använd inte enheten medan den laddas.

5) Låt enheten inspekteras årligen och följ säkerhetsinstruktionerna i manualen

Försök inte att fortsätta använda eller ladda dessa batterier.

Kontakta oss på Miwex för att byta ut batterierna

Vi vill upprepa vikten av att inspektera din enhet årligen med tanke på den aggressiva klor-/poolmiljön där den måste fungera och detta för att garantera säkerheten för rullstolsanvändare och anställda.