

E-motion - Albueortose

ART.NO 20206

E-motion brukes til postoperativ eller posttraumatisk stabilisering av arm og albue for å gi kontrollert bevegelsesområde eller immobilisering. Teleskopmekanisme for enkel justering av lengden. Aluminiumsmansjettene rundt over- og underarm kan formes individuelt slik at risiko for at ortosen sklir reduseres. Ortosen kan enkelt tas på og av med én hånd med låsespenningen.

Ektensjon kan justeres og festes fra 0° - 90° og fleksjon fra 0° - 120°. Innstillingen skjer i intervaller på 10°. Innstillingen kan sikres med strips.

Indikasjoner: • Etter operasjon

- Kontroll av fleksjon-ektensjon
- Kontroll av pronasjon/supinasjon
- Konservativ behandling
- Etter avgipsning

Kontraindikasjoner: Unngå å plassere mansjetten direkte på skadet eller hoven del.

Material: Skinne: 40% Aluminium, 35% Polyamid, 15% Stål, 10% Polyester.

Polstring: 50% Polyuretan, 38% Nylon, 10% Elastan, 2% Syntetisk karbonfiber. Lateksfri.

Vaskeråd: Tekstil polstring: vask ved 30°C, for best holdbarhet anbefales håndvask, tørkes liggende. Skinne og ledd: vask av med klut og varmt vann, mild desinfeksjonsmiddel.

Tillbehør: Håndstøtte for pronation-supination følger med.



MD Class I CE

Størrelse	Side	Art.no
Universal	Venstre	20206-10-50
Universal	Høyre	20206-20-50