

CubitiComfort - Murtumaortoosi

TUOTENRO 20222

CubitiComfort on tukeva koko käsivarren ortoosi käytettäväksi kuntoutuksen yhteydessä tai murtuman hoidossa Samiento-periaatteen mukaan. Miellyttävän tuntuinen ja tukeva ortoosi lievittää särkyä ja mahdollistaa olkapään ja kyynärnivelen liikkuvuuden, mikä vähentää nivelen jäykistymisen ja lihasatrofian riskiä hoidon aikana. Säädetty kyynärnivelen liikkuvuus fleksiassa ja ekstensiassa 15 asteen välein. Voidaan lukita haluttuun asentoon. Helppo mukauttaa potilaalle sopivaksi. Ortoosin leveät vyöt ja muotoonvaletut levyt antavat tasaisen kompression ja vähentävät kuormitusta tehokkaasti. Kiinteitä muotoonvalettuja levyjä, jotka muodostavat sylinteri muotoisen (X & Y), voidaan muotoilla ja ortoosin pituutta voidaan säätää portaattomasti. Sopii sekä oikeaan että vasempaan käsivarteen.

Käyttöaiheet: Diafysiaalisen olkaluun murtuma. Murtuma lähellä kyynärpäätä. Nivelsiteiden vaurio kyynärpäässä.

Vasta-aiheet: Massiivinen pehmytkudosvaurio. Huono noudattaminen. Ei-hyväksyttävä murtuma-asento.


Materiaali: Välimateriaali ilmastoitua kangasta, joka tuntuu viileältä ihoa vasten ja antaa ihon hengittävää. 59% Polyesteriä, 37% Polyamidia, 2% Puuvillaa, 1% Elastaania, 1% Polyuretaania. Ei sisällä lateksia. Nivel alumiinia.

Pesuhjeet: Irrota nivel ennen pesua. Kangasortoosi voidaan pestä koneessa 40°C. Sulje tarranauhat ennen pesua. Suositellaan pesua pesupussissa. Nivel pyyhitään pehmeällä, kostealla liinalla tai suihkutetaan.

Mittaaminen: Olkavarren ja kyynärvarren proksimaalinen ympärysmitta. Ortoosin kokonaismittaa voidaan säätää portaattomasti.

Lisälevyt, tuotenro 20221:

Tilataan erikseen. 4 kpl/pakkaus. Koot S–XL. Lisäävät stabiiliteettia ja kompressiota suuremmalle alueelle. Sivutaskuun voidaan laittaa yksi levy tai kaksi levyä.

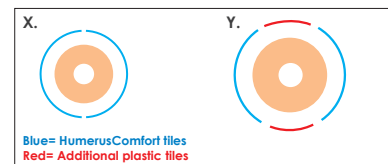

Tarvittaessa käytetään ylimääräisiä levyjä pyöreän puristuksen ylläpitämiseksi vahvemmille käsivarsille.

	A. Olkavarren ympärysmitta (cm)	B. Kyynärvarren ympärysmitta	C. Ortoosin pituus olkavarresta	D. Ortoosin pituus kyynärvarresta	E. Ortoosin kokonaispituus	Art.no
S	14-23	18-26	26,5	17	46-54	20222-09-40
M	23-32	23-32	28,5	19	50-58	20222-09-50
L	30-39	28-38	30,5	20	52-60	20222-09-60
XL	38-50	28-38	30,5	20	52-60	20222-09-70

MD Class I CE