

Victoria - Post-op-BH

ART.NO 31146

Post-op-BH der giver optimal støtte. Anvendes efter brystkirurgi. BH'en kan åbnes både foran og ved skulderstropperne, hvilket sikrer let påsætning og tilpasning af bh'en på operationsstuen og/eller i helingsperioden. Stive kopper, justerbare skulderstropper, justerbar front med hægter. Bryderryg og brede sider gør BH'en stabil.

Modell	Art.no
Victoria, hvid	31146-09
Victoria, sort	31146-00

Størrelse: Fås i størrelserne:

Hvid: 65 E-G, 70 D-G, 75 B-F, 80 A-E, 85 A-D, 90 A-B.

Sort: 65 D-G, 70 A-F, 75 A-F, 80 A-E, 85 A-D, 90 A-C, 95 A-C.

Indikationer: Postoperativ BH med målt op kompression tilsvarende kompressionsklasse 1. Beregnet bruges til forskellige typer af brystoperationer.

Kontraindikationer: Infektion. Arterielle kredsløbsforstyrrelser. Høj risiko for trombose.

Materiale: Polyamid 70%, Elastan 15%, Bomuld 15%. Latexfri.

Vaskeanvisning: Maskinvask 40 °C, kan om nødvendigt vaskes ved højere temperaturer, op til 60°C. Produktet vil holde længere, hvis det vaskes ved lavere temperaturer. Hænges til tørre eller tørres liggende. Må ikke tørretumbles. Luk hægter før vask. Hvis der opstår blodpletter, læg i blød eller vask i koldt vand. Brug ikke blegemiddel skyllemiddel, da dette kan forringe funktionen af materialet.


Måltagning - sådan måler du din størrelse:

Læs sammen med størrelsguide nedenfor.

1. Stramt omkredsmål under brystet = X. Rund op til nærmeste femtal (omkreds på 78 cm giver BH størrelse 80).
2. Løs måling fra brystbenet over brystets højeste punkt til midten af ryggraden = Y. Gang denne måling med 2 = Y2.
3. Forskellen mellem Y2 og X bestemmer skål størrelsen (Y2 - X = skål størrelse).

Størrelse guide:

Omkreds under brystet = X								
Omkreds X cm	63-67	68-72	73-77	78-82	83-87	88-92	93-97	
= Størrelse	65	70	75	80	85	90	95	
Y2-X = Kopp størrelse								
Forskelle (cm)	13	15	17	19	21	23	25	27
Kopp størrelse	A	B	C	D	E	F	G	H

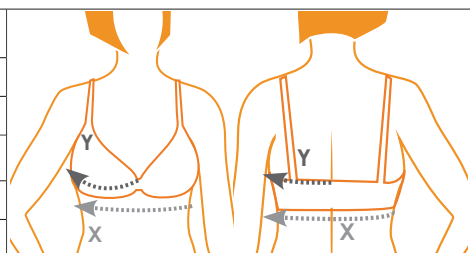

31146-09



Bryderryg. Justerbar front og i skulderstropperne.



31146-00



MD Class I CE

