

Victoria - Postoperativ BH

ART.NO 31146

Postoperativ BH som gir optimal støtte. Brukes etter brystoperasjon. BH'en kan åpnes både ved bryst og skulderstropper, noe som gir enkel påkledning og justering under operasjon og/eller under rekonvalesens. Solide kopper, justerbare skulderstropper, justerbar front med hemper. Brytterygg og brede sider gjør BH'en stødig.

Modell	Art.no
Victoria, hvit	31146-09
Victoria, sort	31146-00

Størrelse: Victoria finnes i størrelsene:

Hvit: 65 E-G, 70 D-G, 75 B-F, 80 A-E, 85 A-D, 90 A-B.

Sort: 65 D-G, 70 A-F, 75 A-F, 80 A-E, 85 A-D, 90 A-C, 95 A-C.

Indikationer: Postoperativ BH med kompresjon motsvarende klasse 1, beregnet for bruk etter ulike typer av brystoperasjoner.

Kontraindikasjoner: Infeksjon. Arterielle sirkulasjonsforstyrrelser. Høy risiko for trombose.

Materiale: Polyamid 70%, Elastan 15%, Bomull 15%. Latexfri.

Vaskeråd: Vaskes ved 40°C, kan om nødvendig vaskes ved høyere temperaturer, opp til 60°C. Produktet holder lenger hvis det vaskes ved lavere temperaturer. Tørkes hengende eller liggende. Ikke bruk tørketrommel. Luck hekter før vask. Hvis man har fått blodflekker på plagget, bløtlegg eller vask i kaldt vann. Bruk ikke blekemiddel eller tøymykner da dette kan virke inn på funksjonen av materialet.

Måling:

Les sammen med størrelsesguiden under.

1. Ticht omkrets måling under bysten = X. Runde opp til nærmeste femtall (omkrets på 78 cm gir en BH størrelse på 80).

2. Løs omkrets måling fra sternum over høyeste punktet av bysten til midten av ryggraden = Y. Multipliser denne målingen 2 = Y2

3. Forskjellen mellom Y2 og X gir skål størrelsen (Y2 - X = cup størrelse).



31146-09



Brytterygg. Justerbar foran og i skulderstropper.



31146-00



Størrelsesguide:

Omkrets under bysten = X								
Omkrets X cm	63-67	68-72	73-77	78-82	83-87	88-92	93-97	
= Størrelse	65	70	75	80	85	90	95	
Y2-X = Skål størrelse								
Forskjelle (cm)	13	15	17	19	21	23	25	27
Cupstørrelse	A	B	C	D	E	F	G	H

