

Felicia - Postoperativ BH

ART.NO 31151

Bøylefri BH i mykt mikrofibermateriale. Stødige skåler, brede og justerbare skulderstropper. Lukkes med hekker i ryggen, 3x3 rader.

Størrelse: Felicia finnes i følgende størrelser: 65 F-G, 70 C-G, 75 C-G, 80 C-G, 85 C-D, 90 C-D.

Indikasjoner: Postoperativ BH.

Kontraindikasjoner: Ingen kjente.

Materiale: Polyamid 95%, Elastan 5%. Latex free.

Vaskeråd: Vaskes ved 40°C, kan om nødvendig vaskes ved høyere temperaturer, opp til 60°C. Produktet holder lenger hvis det vaskes ved lavere temperaturer. Tørkes hengende eller liggende. Ikke bruk tørketrommel. Lukk hekker før vask. Hvis man har fått blodflekker på plagget, bløtlegg eller vask i kaldt vann. Bruk ikke blekemiddel eller tøymykner da dette kan virke inn på funksjonen av materialet.

Måltaking – slik måler du størrelse:

Les sammen med størrelsesguiden under.

1. Tight omkrets målt under bysten = **X**. Rund opp til nærmeste femtall (omkrets på 78 cm gir en BH størrelse på 80).
2. Løs omkrets målt fra sternum over høyeste punktet av bysten til midten av ryggraden = **Y**. Multipliser dette målet 2 = **Y2**
3. Forskjellen mellom **Y2** og **X** gir skål størrelsen (**Y2 - X = cup størrelse**).



Lukk med hekker i ryggen.
Brede og justerbare skulderstropper.
Bred støtte under armhulen.



Størrelsesguide:

Omkrets under bysten = X					
Omkrets X cm	68-72	73-77	78-82	83-87	88-92
= Størrelse	70	75	80	85	90
Y2-X = Skål størrelse					
Forskjell (cm)	17	19	21	23	25
Skål størrelse	C	D	E	F	G

