

Evelina - Bøjle-BH

ART.NO 31152

Bøjle-BH i blødt mikrofiber materiale. Faste lommer, brede og justerbare skulderstropper. Krog og hægte lukning i ryggen, 3x3 rækker.

Størrelse: Evelina fås i størrelserne: 65 C-G, 70 C-I, 75 D-I, 80 D-I, 85 D-G.

Indikationer: Post-op-BH.

Kontraindikationer: Ingen kendte.

Materiale: Polyamid 90%, Elastan 10%. Latexfri.

Vaskeanvisning: Maskinvask 40°C, kan om nødvendigt vaskes ved højere temperaturer, op til 60°C. Produktet vil holde længere, hvis det vaskes ved lavere temperaturer. Hænges til tørre eller tørres liggende. Må ikke tørretumbles. Luk hæfter før vask. Hvis der opstår blodpletter, læg i blød eller vask i koldt vand. Brug ikke blegemiddel eller skyllemiddel, da dette kan forringe funktionen af materialet.

Måltagning - sådan måler du din størrelse:

Læs sammen med størrelsguide nedenfor.

1. Stramt omkredsmål under brystet = X. Rund op til nærmeste femtal (omkreds på 78 cm giver BH størrelse 80).
2. Løs måling fra brystbenet over brystets højeste punkt til midten af ryggraden = Y. Gang denne måling med 2 = Y2.
3. Forskellen mellem Y2 og X bestemmer skål størrelsen (Y2 - X = skål størrelse).



Hysken og hægte lukning i ryggen. Brede og justerbare skulderremme. Bred støtte under armhulen.



Størrelses guide:

Omkreds under brystet = X							
Omkreds X cm	63-67	68-72	73-77	78-82	83-87		
= Størrelse	65	70	75	80	85		
Y2-X = Skål størrelse							
Forskelle (cm)	17	19	21	23	25	27	29
Skål størrelse	C	D	E	F	G	H	I

