

Kvick - Handledsortos

ART.NO 40300

Stabil och bekväm handledsortos som ger säker immobilisering av handleden. Snörning med engreppsdrag ger en jämn kompression och gör ortosen enkel att justera och ta på med en hand. Försluts med ett brett kardborreband som även ger extra stabilitet runt handleden.

Kvick är tillverkad i stabil mockaimitation, materialet är perforerat och polstrat för god komfort och funktion - mjuk och skön mot huden. Ortosen har en formad stabil 25 mm bred volar aluminiumskena, samt en 15 mm dorsal skena. Finns i två längder.

Indikationer: Stabiliserar och förhindrar rörelse i handled och tillåter rörelse av fingrar.

- Stabilisering efter gips.
- Instabilitet.
- Stukningar och sträckningar.
- Mjukvävnadsskador och -tillstånd.
- Artrit.

Kontraindikationer: Använd inte över öppna sår. All känd allergi och/eller överkänslighet mot material som anges i produkt-sammansättningen. Försiktighet bör iaktas vid förskrivning till patienter med diabetes, kärlproblem och neuropati.

Material: Polyester, Polyuretan, Polyamid, Koppar, Aluminium. Latexfri.

Tvättråd: Stäng alla kardborreremmar och ta bort metallskenan. Handtvätta stödet i kallt vatten med mildt rengöringsmedel. Skölj och torka plant. Ska inte centrifugeras eller torktumlas. Använd aldrig sköljmedel. Kontrollera om det finns försämringar som kan påverka användningen. Kontrollera regelbundet att kardborrefästen fungerar säkert. Innan du använder stödet igen ska du sätta tillbaka metallskenan och säkerställa att skenan sitter på rätt håll och att den är instoppad under kanten/"läppen" på fickan.

Måttagning: Handledsmått i cm.

Storlek	Handledsmått cm	Längd cm	Art.no Vänster	Art.no Höger
Kvick				
S	13-15	20	40300-10-40	40300-20-40
M	15-18	20	40300-10-50	40300-20-50
L	18-20	20	40300-10-60	40300-20-60
XL	20-23	20	40300-10-70	40300-20-70
Kvick Long				
S	13-15	25	40300-16-40	40300-26-40
M	15-18	25	40300-16-50	40300-26-50
L	18-20	25	40300-16-60	40300-26-60
XL	20-23	25	40300-16-70	40300-26-70



MD Class I CE