

Peggy - Knielange Kompressionshose

ART.NO 51206

Knielange Kompressionshose aus nahtlos gestricktem Material. Empfohlen nach Eingriffen an Gesäß, Hüfte und/oder Oberschenkeln, wie Fettabsaugung und/oder Chirurgie. Das Kleidungsstück kann auch als "Step-2-Produkt" nach einer größeren Operation verwendet werden, wo eine Kompression für längere Zeit nach der Operation empfohlen wird. Die Hose wird vorne mit einem Hakenverschluss geknöpft, um ein einfaches Aus- und Anziehen, sowie eine gute Passform zu gewährleisten. Bund mit Silikonrand, was ein Rutschen verhindert und den Tragekomfort erhöht. Breiter Keil an der Oberschenkelinnenseite für besten Komfort und Funktionalität. Die Hose hat im Schrittbereich eine versteckte Öffnung um einen Toilettenbesuch zu ermöglichen, ohne dass das Kleidungsstück dabei ausgezogen werden muss. Die Öffnung ist so gestaltet, dass eine gute Kompression in diesem Bereich gewährleistet wird. Gestricktes, flexibles Material in 4-Wege-Stretch, das sich dem Körper anpasst. Entlastet und komprimiert, ohne zu schneiden oder unangenehm zu werden. Gestrickte Quetschzonen im Gesäß- und Leistenbereich sowie über dem Bauch werden verstärkt.

Anwendungsbereiche: Kompressionskleidung nach plastischer Chirurgie. Entsprechende Kompressionsklasse 1.

Kontraindikationen: Infektion. Arterielle Durchblutungsstörungen. Hohes Thromboserisiko.

Material: 87% Polyamid, 13% Elasthan. Latexfrei.

Waschanleitung: Maschinenwäsche 40°C, kann bei Bedarf bei höheren Temperaturen gewaschen werden, max. 60°C. Die Lebensdauer des Produkts ist jedoch länger bei einer niedrigeren Waschtemperatur. Die Verwendung eines Waschsäckchens wird empfohlen. Verwenden Sie keine Bleichmittel, Chlor oder Weichspüler. Nicht Trockner geeignet.


Maße: Für eine bestmögliche Passform und den richtigen Kompressionsgrad ist es wichtig, dass das Kleidungsstück sorgfältig, gemäß den Angaben der Maßtabelle, angepasst wird. Das Kleidungsstück muss eng anliegen, darf sich aber nicht unangenehm oder einengend anfühlen.

Taille: Messen Sie den Umfang an der schmalsten Stelle der Taille.

Hüfte: Stellen Sie sich mit geschlossenen Beinen auf eine gerade Unterlage und messen Sie den Umfang ihrer Hüfte über dem Schambein, an der breitesten Stelle Ihres Gesäßes/Hüfte.

Schenkel: Der Umfang wird in der Mitte des Oberschenkels gemessen.

Größe	Tailen- umfang cm	Hüft- maße cm	Oberschen- kelmaße cm	Art.no Schwarz	Art.no Beige
XS	62-68	86-91	46-50	51206-00-30	51206-08-30
S	69-75	92-97	50-54	51206-00-40	51206-08-40
M	76-83	98-103	54-58	51206-00-50	51206-08-50
L	84-92	104-111	58-62	51206-00-60	51206-08-60
XL	93-101	112-119	62-66	51206-00-70	51206-08-70
2XL	102-110	120-127	66-70	51206-00-80	51206-08-80

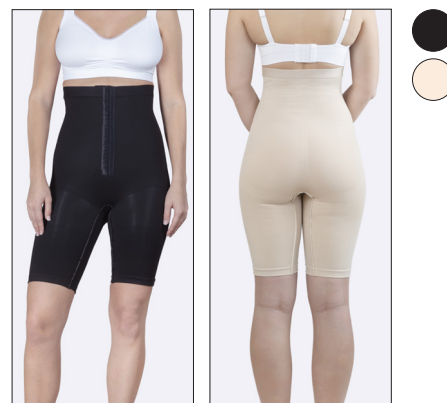

Silikon im Bund.

