

Peggy - Kompressiohousu

TUOTENRO 51206

Polvipituiset kompressiohousut neulotusta saumattomasta materiaalista. Suositellaan pakaroiden, lantioiden ja/tai reisien toimenpiteiden kuten rasvaimun ja/tai kirurgian jälkeen. Voidaan myös käyttää ns. toisen vaiheen vaatteena suuremman toimenpiteen jälkeen, kun kompressiota suositellaan käytettävän pidemmän aikaa leikkauksen jälkeen. Hakaskiinnitys edessä helpottaa pukemista ja riisumista sekä istuvuuden säätämistä. Vyötäröllä oleva silikoninauha pitää housut mukavasti paikoillaan. Leveä kiila reiden sisäpuolella parhaan mukavuuden ja toiminnan takaamiseksi. Avoimen haaraosan ansiosta vaatetta ei tarvitse riisua WC-käyntien ajaksi. Kompressio parantaa verenkiertoa ja vähentää turvotusta leikkauksen jälkeen. Muotoon neulottu, joustava materiaali venyy neljään suuntaan ja mukautuu näin kehon muotoihin. Vähentää kuormitusta ja antaa tukea tuntumatta epämukavalta ja puretumatta ihoon. Muotoon neulottu takapuolen, olkapäiden ja nivusten kohdalla. Vatsan kohdalla vahvistettua neulosta.

Käyttöaiheet: Kompressiovaate plastiikkakirurgisten toimenpiteiden jälkeen. Vastaa kompressioluokkaa 1.

Vasta-aiheet: Haavainfektio, valtimoverenkiertohäiriöt, suuri tromboosiriski sekä taulukosta poikkeavat mitat.

Materiaali: 87% polyamidia, 13% elastaani. Silikoninauha vyötäröllä. Ei sisällä lateksia.

Pesuohe: Konepesu 40°C. Tarvittaessa voidaan käyttää korkeampaa lämpötilaa, enintään 60°C. Alhaisempi pesulämpötila pidentää tuotteen käyttöikää. Käytä pesupussia. Älä käytä valkaisuainetta, klooria tai huuhteluainetta. Ei rumpukuivausta.

Mittaus: Hyvän istuvuuden ja oikean kompressioasteen saavuttamiseksi on tärkeää, että vaatetta sovitetaan huolellisesti mittataulukkoa käyttäen. Vaatteen on istuttava napakasti, mutta se ei saa tuntua epämukavalta eikä puristavalta.


Vyötärö: Mittaa vyötärön pienin ympärysmitta.

Lantio: Seiso jalat yhdessä ja ota ympärysmitta lantion leveimmästä kohdasta häpyluun päältä kohdasta, jossa lantio on leveimmillään.

Reisi: Reiden keskiosan ympärysmitta.



Silikoninauha vyötäröllä.

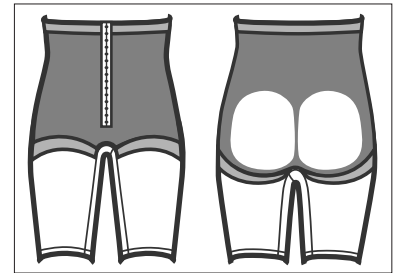

Koko	Vyötärön mitta cm	Lantion mitta cm	Reisi cm	Tuotenumero Musta	Tuotenumero Beige
XS	62-68	86-91	46-50	512060030	512060830
S	69-75	92-97	50-54	512060040	512060840
M	76-83	98-103	54-58	512060050	512060850
L	84-92	104-111	58-62	512060060	512060860
XL	93-101	112-119	62-66	512060070	512060870
2XL	102-110	120-127	66-70	512060080	512060880

