

TopScore ROM - Polviortoosi

TUOTENRO 70645

Postoperatiivista polviortoosia käytetään stabiloivana tai vamman, leikkauksen jälkeen ja mediaaliseen/ lateraaliseen vakauttamiseen. Kehitetty mahdollistamaan nopea ja yksinkertainen tuotteen sovitus loukkaantumisen/leikkauksen jälkeen.

Ortoosin sisäpuoli on pehmeää materiaalia, joka tarttuu jalkaan hyvin ja pitää ortoosin paikallaan. Leikkaamalla hihnat yksilölliseksi auttaa ortoosin pukemista päälle. Kiskot voidaan säätää erikseen säädettäväksi jokaisen potilaan jälkeen.

Teleskooppimekanismin avulla ortoosin pituutta voidaan säätää, 48 cm - 63,5 cm. Pidennystä ja taipumista voidaan säätää. Lukittuu 0° - 45° 10°/15° välein. Tarkistettu liikealue 0° - 120° on helppo määrittää painikkeella 10°/15° välein. Asetus voidaan varmistaa pienillä nippusiteillä, jotka ovat mukana pakkauksessa.

Käyttöaiheet: Postoperatiivinen stabilointi. Posttraumaattinen stabilointi. ACL-leikkauksen jälkeisen liikealueen hallitsemiseksi. PCL, MCL ja LCC, polvilumpio, nivelrikko, vakaa reisiluun murtuma ja sääriluun murtuma.

HUOM! Käytetään terveydenhuollon ammattilaisen ohjauksessa ja määräyksestä.

Koko: Yksi koko sopii kaikille.

Materiaali: Alumiini, vahto, tarranauha. Ei sisällä lateksia.

Pesuohteet: Tekstiiliverhoilu - Konepesu 30°C. Parhaan kestävyys takaamiseksi suositellaan käsinpesua. Kiskot ja liitos – pyyhitään liinalla ja lämpimällä vedellä/ desinfiointiaineella.


Koko	Tuotenro
Universal	70645-00-50
Lisätarvikkeet	Tuotenro
Pehmuste	70645-00-55
Nauhat	70645-00-65



Teleskooppimekanismin avulla ortoosin pituutta voidaan säätää, 48 cm - 63,5 cm.



Pidennystä ja taipumista voidaan säätää ja lukita 0° - 45° välein noin 10°/15°. Hallittu liikealue määritetään välillä 0° - 120° helposti painikkeella ajoittain noin 10°/15°.

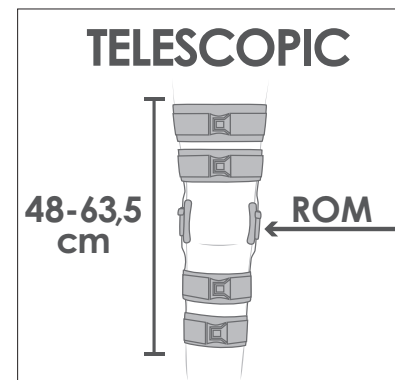

MD Class I CE