

# GeniX ROM - Knæortose

ART.NO 70646

Postoperativ knæortose, der anvendes efter skade eller operation i knæleddet, hvor der er behov for kontrolleret bevægelsesområde eller total immobilisering af knæleddet. Ortosen er udviklet til at muliggøre hurtig og nem tilpasning efter skade/kirurgi. GeniX ROM har en meget lav vægt og er behagelig at have på.

Med teleskopmekanismen kan ortosens længde justeres fra cirka 45 cm til 64 cm i intervaller af 0,8 cm. Skinner og manchetter kan bøjes for tilpasning individuelt til hver patient. Alle manchetter er aftagelige. Ortosens inderside er forsynet med blød polstring samt en skridsikker silikonebelægning, der sikrer, at ortosen forbliver på plads. Afskårne stropper med hurtigspænder forenkler tilpasning samt på- og aftagning for patienten.

Bevægelsesområdet kan indstilles til ekstension fra -10° til 90°, flexion fra 0° til 120°, begge i intervaller på 10°. ROM-indstillingen er sikker og ændrer sig ikke af sig selv under brug. Hurtiglås fikserer ROM i et område fra -10° til 30°.

**Indikationer:** Postoperativ og posttraumatisk immobilisering/stabilisering af knæleddet.

**Kontraindikation:** Ikke beregnet til personer med vægt >110 kg.


**Materiale:** Aluminium, polyoxymethylen, polyamid, polyurethan, viskose, elastan, silikone. Latexfri.

**Vaskeanvisninger:** Tekstilbeklædning: Vask 40°C grader. Den bedste holdbarhed opnås ved at håndvaske og lufttørre tekstilet.

Skinnerne og samlingerne: Vaskes med en klud og varmt vand/mildt desinfektionsmiddel.

| Størrelse           | Art.no    |
|---------------------|-----------|
| GeniX ROM Universal | 706460050 |


| Tilbehør          | Art.no    |
|-------------------|-----------|
| GeniX ROM Straps  | 706460054 |
| GeniX ROM Padding | 706460055 |

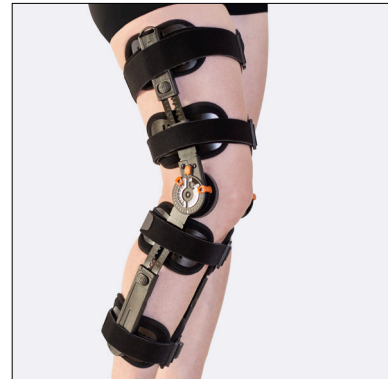

Aluminiumsmanchetterne kan formes, så de passer til benet.



Hurtigudløsende spænde på remmene.

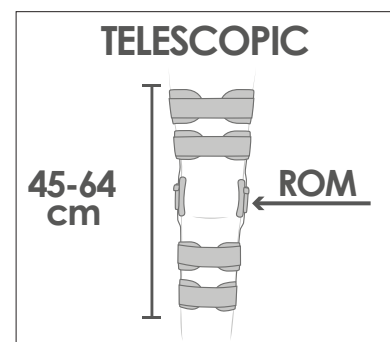

MD Class I CE