

GeniX ROM - Knäortos

ART.NO 70646

Postoperativ knäortos, används efter skada eller operation i knäled, där kontrollerat rörelseintervall eller total immobilisering i knäleden behövs. Ortosen är utvecklad för att möjliggöra snabb och enkel utprovning efter skada/operation. GeniX ROM har en mycket låg vikt och är bekväm att bära.

Med teleskopmekanismen kan ortosens längd justeras, från ca 45 cm till 64 cm i steg om 0,8 cm. Skenorna och manschetterna kan bockas för att individuellt anpassas efter varje patient. Samtliga manschetter är flyttbara. Insidan av ortosen är försedd med mjuk polstring, som med anti-glid silikonbeläggning som gör att ortosen sitter på plats. Klippbara band med snabbspännen förenklar utprovning samt på- och avtagningen för patienten.

Rörelseomfånget kan ställas in för extension från -10° till 90°, flexion från 0° till 120°, båda i intervall om 10°. ROM-inställningen är säker och ändras ej av sig själv vid användning. Snabblås på leden fixerar ROM i intervall från -10° till 30°.

Indikationer: Postoperativ och posttraumatisk immobilisering/stabilisering av knäleden.

Kontraindikationer: Ej avsedd för personer med vikt >110 kg.

Material: Aluminium, polyoximetylen, polyamid, polyuretan, viskos, elastan, silikon. Latexfri.

Tvättråd: Textil polstring - Fintvätt 40°C. För bästa hållbarhet rekommenderas handtvätt, plantorkas.

Skenorna och leden - Torkas av med trasa och varmt vatten/milt desinfektionsmedel.

Storlek	Art.no
GeniX ROM Universal	706460050


Tillbehör	Art.no
GeniX ROM Straps	706460054
GeniX ROM Padding	706460055



Manschetterna i aluminium kan formas för att anpassa sig till benet.



Snabbspänne på banden.

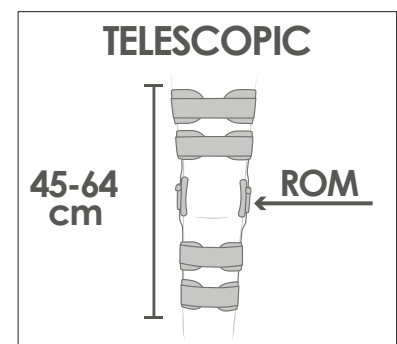

MD Class I CE