

# GenuFeel - Gonartroseortose

ART.NO 70659

GenuFeel er en let og bekvem knæortose, som anvendes til smertelindring og for at lette og forbedre funktionen ved knæartrose. Det elastiske stof er tyndt og åndbart. Åbning foran og bløde lommer for nem påtagning. Justerbar lukning med velcro.

Ortosen har et unikt fastgørelsessystem med sammenlåsende stropper og spænder til hurtig og nem påsætning. Trepunktssystemet aflaster den smertefulde side af knæet, giver støtte efter behov, stabilitet når du går og er afslappet når du sidder. Indsyet manchet for optimal trykfordeling og sikker placering på benet.

Unilateral skinne (metal) med mulighed for begrænsning af fleksion (20°, 40°) og ekstension (0°, 10°). Plastskinne med integreret ring til aflastning og korrekt positionering af ortosen. Puder til ekstra beskyttelse fra ringen og mancherterne.

**Indikationer:** Moderat slidgigt i knæledet. Postoperativ ortose efter brusk- eller meniskoperation.

**Kontraindikationer:** Ingen kendte.

**Materiale:** 55% Polyester, 31% Polyamid, 8% Elastan, 5% Andre fibre. Der er latex i produktet (hvid og orange sløjfe).

**Vaskeanvisninger:** Tag skinnen ud. Vask i lunken vand med neutralt rengøringsmiddel. Lad den tørre væk fra varmekilder. Sæt skinnen på plads igen.

**Størrelse og mål:** Omkreds lår, mål 15 cm over knæet fra centrum af patella.

Venstre: for medial gonartrose i venstre knæ (varus venstre knæ) eller for lateral gonartrose i højre knæ (valgus i højre knæ)

Højre: for medial gonartrose i højre knæ (varus højre knæ) eller for lateral gonartrose i venstre knæ (valgus i venstre knæ)



Syningen er dækket af øvrig tekstil og kommer ikke i kontakt med huden.



MD Class I CE

Størrelse	Omkreds 15 cm over midten af patella cm	Venstre Art.no	Højre Art.no	Længde	
XS	33-39	70659-10-30	70659-20-30	40 cm	
S	39-45	70659-10-40	70659-20-40		
M	45-52	70659-10-50	70659-20-50		
L	52-58	70659-10-60	70659-20-60		
XL	58-66	70659-10-70	70659-20-70		
2XL	67-74	70659-10-80	70659-20-80		
3XL	74-81	70659-10-90	70659-20-90		