

Stadig - Ankelortose

ART.NO 80120

Stadig er en stabil ankelortose som kan anvendes ved akutte skader eller langvarig instabilitet i ankelledet. Ortosen kan også anvendes forebyggende. Den bløde polstring former sig efter ankels kontur giver god støtte og komfort. Plastskinnerne er universelle og passer til både højre og venstre fod. Stabile velcrobånd fikserer ortosen efter ønske. For optimal funktion skal ortosen anvendes sammen med snørresko, vandresko eller gymnastiksko.

Størrelse: Universelstørrelse.

Indikationer: Alvorlige og moderate akutte ankelforstuvninger (konservativ og postoperativ behandling), stabil malleolær fraktur, genoptræning efter frakturer.

Kontraindikationer: Ingen kendte.

Materiale: Nylon, Polyester, PU-skum, Glasfiber. Latexfri.

Vaskeanvisning: Fjern skumpolstringen og remmene fra skinnen. Luk velcron på stropperne. Håndvask stropperne og skum ind i lunkent vand (max 35°C) med en mild sæbe. Skyl med vand og lad det tørre ved stuetemperatur. Rengør plastikskallerne med en fugtig klud. Sørg for, at materialerne er grundigt tørre inden skinnen bruges igen.



MD Class I CE

Størrelse	Farve	Art.no
Universal	Sort	80120-00-50