

AirFoam - Ankelortos

ART.NO 80123

AirFoam är en stabil ankelortos som kan användas vid akuta skador eller långvarig instabilitet i ankleden. Tillåter dorsal- och plantarflexion. Ortosen kan också användas i förebyggande syfte, vid t ex idrott. För optimalt stöd och kompression består polstringen av en kombination av luft och foam som formar sig efter ankels kontur. Mängden luft kan justeras efter patientens behov, vilket är särskilt lämpligt vid svullnad. Lattorna är universala och passar både höger och vänster fot. Stabila kardborrband fixerar ortosen i rätt läge. För optimal funktion skall ortosen användas tillsammans med snörsko, typ promenadsko/gymnastisko.

Storlek: Universal storlek.

Indikationer: Allvarliga och moderata akuta ankelstukningar (konservativ och postoperativ behandling), stabil malleolfraktur, rehabilitering efter frakturer.

Kontraindikationer: Inga kända.

Material: Nylon, Polyester, PU-skum, Glasfiber. Latexfri.

Tvåfråd: Ta bort skumpolstringen och remmarna från skenan. Förslut kardborren på remmarna. Handtvätta remmarna och polstring in i ljummet vatten (max 35°C) med en mild tvål. Skölj med vatten och låt den torka i rumstemperatur. Rengör plastskalen med en fuktig trasa. Se till att materialen är ordentligt torra innan återanvändning.



MD Class I CE

| Storlek | Färg | Art.no |
|-----------|-------|-------------|
| Universal | Svart | 80123-00-50 |