

WalkerROM - Walker

TUOTENRO 80211

WalkerROM on kevyt nilkkaortoosi, jota on miellyttävä käyttää. Ortoosissa on tukevat, muotoiltavat sivuvarret ja leveät ympäri kulkevat tarranauhat. Rullapohja mahdollistaa tasaisen ja pehmeän kävelyn. Matalan profiilin ansiosta toisessa jalassa voidaan käyttää tavallista kenkää. WalkerROM -ortoosia on helppo säätää neutraalista asennosta 45° fleksioon ja 45° ekstensioon, säätöväli 7,5°. Nivel voidaan lukita tiettyyn asentoon, liikettä voidaan rajoittaa tai nivel voidaan säätää vapaasti liikkuvaksi.

Mukana kaksi ylimääräistä pysäytysnastaa ja kuusiokulma-avain.

Käyttöaiheet: Jalan ja nilkan immobilisointiin. Pehmytkudosvaurioiden, nyrjähdysten, stabiilien murtumien ja akillesjänteen repeämän hoitoon. Myös nilkan stabilointiin leikkauksen jälkeen.

Vasta-aiheet: Ei saa käyttää potilaille, joilla on diabetes. Ei saa käyttää potilaille, joilla on instabiili murtuma.

Riskit: Ei tiedossa.

Materiaali: Pehmuste polyesteriä.

Pesuhjeet: Päällysosa puhdistetaan kostealla liinalla. Pehmuste pestään käsin max 30°. Tasokuivaus. Ei rumpukuivausta.

Koko	Vastaava kengän koko	Tuotenro
XS	34-35	802110030
S	35-38	802110040
M	39-43	802110050
L	44-45	802110060
XL	45-48	802110070

Lisävarusteet:

Tuote:	Koko	Tuotenro Universaali	Tuotenro Koko S/M	Tuotenro Koko L/XL
Cirrus, Socks 2-pcs	Universaali	802153000	-	-
Hygiene protection 10-pcs	Universaali	802190000	-	-
Rain cover	S/M, L/XL	-	802200040	802200060

Ota yhteyttä asiakaspalveluun saadaksesi lisätietoja muista lisävarusteista.



MD Class I CE