

Hälkilar för Walkers

ART.NO 80215, 80224, 80225

Indikationer: Achillesruptur. Som inlägg i en walker för att öka plantarflexion i fotled vid behov.

Kontraindikationer: Inga kända.

Funktion: Samtliga kilar är avsedda att placeras i en walker för ökad plantarflexion enligt behandlingsplan för achillesruptur. Dubbelhäftande tejp mellan kilarna håller dem på plats.



80215 - Cirrus hälkil, höger/vänster.

Cirrus, heel wedge Left/Right - 80215:

5 kilar med platå, anatomiskt formade för höger/vänster fot. Plantarflexion anpassas med antal kilar, välj antal kilar i relation till fotstorlek samt önskad plantarflexion. Finns i två varianter höger/vänster, båda i universalstorlek.

Material: EVA, PA. Latexfri.

Produkt:	Storlek	Art.no Universal
Cirrus, Left heel wedge	Universal	802151000
Cirrus, Right heel wedge	Universal	802152000



80224 - Hälkil 10°, utan platå, bilateral.

Walker Wedge Kit 10° - 80224:

3 kilar, utan platå. Kilarna placeras ovanpå varandra för att uppnå önskad plantarflexion: 3 kilar = 30° plantarflexion, 2 kilar = 20° plantarflexion, 1 kil = 10° plantarflexion. Finns i två storlekar, bilateral.

Material: EVA. Latexfri.

Produkt:	Art.no Storlek 1	Art.no Storlek 2
Walker Wedge Kit 10°	802240040	802240060



80225 - Stratus hälkil, bilateral.

Stratus, Universal heel wedge - 80225:

4 kilar och en sula, med platå. Plantarflexion anpassas med antal kilar, välj antal kilar i relation till fotstorlek samt önskad plantarflexion. Universalstorlek, bilateral.

Material: Sula: SBR, PES, PA. Kilar: PE. Latexfri.

Produkt:	Storlek	Art.no Universal
Stratus, Universal heel wedge	Universal	802250000



Vätråd: Rengöres med mjuk fuktig trasa och mildt rengöringsmedel.