

Hælkiler for Walkers

ART.NO 80215, 80224, 80225

Indikasjoner: Achillesruptur. Som et innlegg i en walkerortose for å øke plantarfleksjon i ankelen ved behov.
Kontraindikasjoner: Ingen kjent.



80215 - Cirrus hælkile, høyre/venstre.

Funksjon: Alle kiler er ment å plasseres i en walker for å øke plantarfleksjon i henhold til behandlingsplanen for akillesruptur. Dobbeltsidig tape mellom kilene holder dem på plass.

Cirrus, heel wedge Left/Right - 80215:

5 kiler med platå, anatomisk formet for høyre/venstre fot. Plantarfleksjon justeres med antall kiler, velg antall kiler i forhold til fotstørrelse og ønsket plantarfleksjon. Tilgjengelig i to varianter høyre/venstre, begge i universalstørrelse.

Material: EVA, PA. Lateksfri.

Produkt:	Størrelse	Art.no Universal
Cirrus, Left heel wedge	Universal	802151000
Cirrus, Right heel wedge	Universal	802152000



80224 - Hælkile 10°, uten platå, bilateral.

Walker Wedge Kit 10° - 80224:

3 kiler, uten platå. Kilene plasseres oppå hverandre for å oppnå ønsket plantarfleksjon.
3 kiler = 30° plantarfleksjon,
2 kiler = 20° plantarfleksjon,
1 kile = 10° plantarfleksjon.
Tilgjengelig i to størrelser, bilateral.

Material: EVA. Lateksfri.

Produkt:	Art.no Størrelse 1	Art.no Størrelse 2
Walker Wedge Kit 10°	802240040	802240060



80225 - Stratus hælkile, bilateral.

Stratus, Universal heel wedge - 80225:

4 kiler og en såle, med platå. Plantarfleksjon justeres med antall kiler, velg antall kiler i forhold til fotstørrelse og ønsket plantarfleksjon. Universell størrelse, bilateral.

Material: Såle: SBR, PES, PA. Kiler: PE. Lateksfri.

Produkt:	Størrelse	Art.no Universal
Stratus, Universal heel wedge	Universal	802250000



Vaskeråd: Rengjøres med myk, fuktig klut og mildt oppvaskmiddel.