

# Skulder & arm

FRAKTURORTOSER OG SLYNGER



NordiCare<sup>®</sup> +

# Unikke funktioner til individuelle behov

NordiCare-ortoser og -slynger er designet til at hjælpe og stabilisere i forskellige grader af svaghed eller instabilitet, men bruges også til smertelindring eller behandling af brud. Alle har unikke funktioner og fordele, der giver dig mulighed for at give eller modtage en helt tilpasset behandlingsplan baseret på individuelle behov.

## Menneskenært design

En central del af NordiCares produktudvikling er funktion og brugervenlighed - vores drivkraft er at udvikle funktionelle produkter i tiltalende design, der gør hverdagen lettere for både brugere og lægefaget. Vi kalder det "Menneskenært design".

## Nøje udvalgt

NordiCares sortiment er udviklet i tæt samarbejde med fysioterapeuter, læger og brugere. Der er også et tæt samarbejde med internationalt førende producenter af materialer og producenter af sundhedsprodukter. Sortimentet udvikles løbende, hvor valget af samarbejdspartnere er mindst lige så vigtigt som deres eget design- og udviklingsarbejde. Kunden skal altid føle sig sikker i valget af NordiCares produkter med hensyn til produkt-kvalitet, funktion og miljøpåvirkning. Vi kalder dette "Nøje udvalgt".

## Forbedret sundhedsøkonomi

Baseret på de begrænsede ressourcer, der er til rådighed for sundhedsvæsenet, bliver vigtigheden af en forbedret sundhedsøkonomi stadig mere afgørende. Det er vigtigt for sundhedsvæsenet at søge både økonomiske og effektive løsninger. Derfor er det et vigtigt mål for NordiCare at udvikle omkostningseffektive produkter, der kan bidrage til en forbedret sundhedsøkonomi, såsom kortere plejetider og mere effektiv behandling.



# Frakturortoser

## HumerusComfort + Extend - Frakturortose


Stabile frakturortoser i to forskellige længder, designet til at kontrollere humerus-segmenterne ved cirkulær kompression af de bløde dele. De anvendes i den ikke-operative behandling af lukkede skaffraktureturer i humerus og i postoperativ behandling af åbne skaffraktureturer i humerus. Ved mere distalt placerede diafyse-humerusfrakturer og på lange overarme anbefales HumerusComfort Extend, som er lidt længere end HumerusComfort.

Ortosen giver smertelindring og tillader bevægelse af skulder- og albueledet. Tekstilskuldersektionen gør at ortosen sidder behageligt og sikkert på plads. Integreerede støbte plader giver stabilitet og cirkulær kompression efter Sarmiento-princippet. Fås i sort i størrelserne S-XL. Art.nr 20220 og Extend 20224.

### ✓ Standardortose til diafyse-nære frakturer



Stabiliserer diafyse-nære frakturer

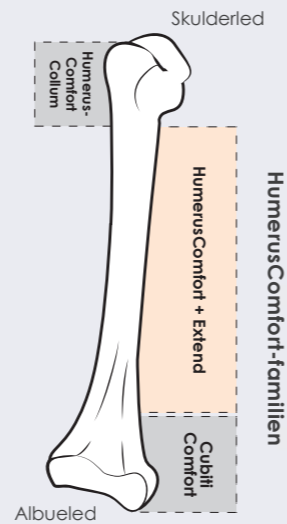

Passer til både højre og venstre arm.



HumerusComfort Kid

Omfavner skulderen

Sidder behageligt og sikkert med brede stropper

De formstøbte plader bidrager til jævn kompression for at stabilisere bruddet



Cirkulær kompression i henhold til Sarmiento-princippet

### Sarmiento-princippet

Sarmiento-princippet er en behandlingsmetode, der anvendes ved armfrakturer for at stabilisere frakturen, samtidig med at bevægeligheden bevares. Ved at påføre cirkulær kompression omkring overarmen opretholdes frakturens position stabil, mens skulder- og albueledene stadig kan bevæge sig. Dette fremskynder tilbagevenden til daglige aktiviteter under helingsprocessen.



### CubitiComfort - Frakturortose

Stabil og behagelig helarmsortose, der bruges til brudbehandling og eller rehabilitering. Ortosen kan tilpasses individuelt og lindrer smerter og giver mulighed for mobilitet i skulder og albue. Albue flexion eller forlængelse kan justeres med intervaller på 15° og låses i den ønskede position. Brede cirkulære bånd sammen med støbte plader giver jævn kompression og af lastning. Tekstil-skuldersektionen gør at ortosen passer komfortabelt og sikkert på plads. Længden kan justeres uendeligt. Passer både højre og venstre arm. Fås i hvid og S-XL. Art.no 20222.

✓ Perfekt ved multitraume og postoperativt

Til artikulære frakturer på humerus, radius eller ulna



Justerbar flexion/extension i albueledet.



### HumerusStabil Kort Frakturortose

Frakturortose i kort model. Anvendes til behandling af skaffrakturer i humerus, efter intern fiksering og i svær hævelse. Passer både højre og venstre. Fås i S-XL. Art.no 20211.



### HumerusStabil Lang Frakturortose

Frakturortose designet til at kontrollere segmenterne af humerus ved at komprimere de bløde dele. Anvendes til behandling af akselfrakturer i humerus efter intern fiksering og i svær hævelse. Passer både højre og venstre. Fås i XS-2XL. Art.no 20210.



De fleste af NordiCares tekstil skulder- og rustningsposer kan vaskes i 40 grader eller mere. Der er klare vaskeanvisninger på emballagen og også på vores hjemmeside.



Prøv en større eller mindre ortose, hvis dimensionerne er mellem to størrelser, eller hvis ortosen ikke passer perfekt. Detaljerede prøveoplysninger findes på emballagen og på vores hjemmeside.

## Armslynger

### HumerusComfort Collum - Armslynge

Armslynge med funktion til at aflaste og placere skulderledet. Ved at placere skaffledet i en så let position som muligt med ringe indflydelse på skaffledets muskulatur opnås gode betingelser for heling og smertelindring. Bruges i proximale humerusfrakturer i stedet for "normal" armsløjfe. Kan bruges i kombination med HumerusComfort Extend til humerus brud, hvor der ønskes ekstra stabilitet. Fås til højre og venstre arm i universal størrelse. Art.no 20225.

✓ Lindring og smertelindring ved proksimale humerusfrakturer



Komfortabel og stabil i ryggen.



Let at åbne for til eksempel træning.

"Giver en sikker følelse under hele dagen og natten"

Skulderledet er placeret i en aflastet stilling



### QuickSling - Armslynge

Polstret bånd leveret på rulle. Den ønskede længde skæres, så den passer til patienten. Justeret med Y-format borrelås. Passer både til venstre og højre arm. Art.no 20118.



### ComfortSling - Armslynge

Bruges ved kortere behandlingstid og passer til forskellige størrelser, også børn. Det elastiske materiale tilpasser sig armen, og et blødt tumbånd hjælper med at holde armen i position. Passer til både venstre og højre arm. Art.no 20111.



ComfortSling kan bruges i kombination med HumerusComfort.

## Fikseret mitellor



### DuoPlus - Fikseret mitella

Immobiliserer og aflaster skulderledet uden at anstrenge nakken. Anvendes i tilfælde af akut personskade eller efter operation. To stropper krydses over ryggen og fordeler vægten over begge skuldre. Bred aftagelig rem med borrelås fastgør armen til trunkus. Passer både til venstre og højre arm. Fås i S-XL. Art.no 20113.

✓ Belaster ikke nakken



### DuoTrain - Fikseret mitella

Giver stabil fiksering og lindring i akut pleje eller postoperativ pleje. Ekstra stærke velcrolukninger med slidplader gør det muligt at åbne og lukke DuoTrain mange gange og anbefales derfor til rehabilitering. Skulderremmen kan justeres i højden og sideværts langs midten og fastgøres med velcro. Justerbar immobiliseringsrem rundt om kroppen. Passer både til venstre og højre arm. Fås i S-XL. Art.no 20119.

✓ Perfekt til rehabilitering



### Duo - Fikseret mitella

Fastgør skulderen og giver støtte og lindring af smerterelaterede skulderproblemer i tilfælde af akutte kvæstelser eller efter operationen. Justerbare skulder- og skulderremme fastgjort med velcro. Immobiliseringsremme, der låser overarmen til trunkus er inkluderet. Et blødt tommebånd holder løkken på plads og sikrer, at armen holdes i den rigtige position. Passer både til venstre og højre arm. Fås i S-XL. Art.no 20114.

✓ En god allroundslynge

### SmartCuff - Fikseret mitella

Giver behagelig støtte og aflastning af armen og skulder efter planlagte operationer. Låser effektivt arm og skulder. Anbefales til rehabilitering. Håndledsmanchetter åbnes derefter separat for at frigøre armen uden at ændre den faste position på overarmen. Let for patienten at fjerne, justere og justere. Ekstra kilepude inkluderet til positionering / bortføring. Passer både højre og venstre arm. Fås i S/M og L/XL. Art.no 20120.

✓ Efter planlagte operationer



Aflaster effektivt skulder/arm.



## Abduktionsortoser



### Shoulder ABDuction Pillow 15° - Abduktionsortose

Giver støtte og immobilisering efter operation eller ustabil skulder. En pude holder armen/skulderen immobiliseret i 15° abduktion. Det aflastende 3-punkts-system er nemt at påføre. Længden på stropperne kan nemt justeres. Den bløde armpose kan åbnes hurtigt for armmobilisering, træning eller personlig hygiejne. Passer til både venstre og højre arm. En ekstra hygiejnestrop til armhulen er inkluderet. Fås i S-XL. Art.nr 20130.

✓ Behagelig immobilisering

# Albueortoser

## E-motion - Albueortose

Giver postoperativ eller posttraumatisk stabilisering og kontrolleret bevægelsesområde eller mobilisering af arm og albue. Ortoesen føles behagelig og sikker at have på. Teleskopmekanisme gør det nemt at justere længden. Forlængelsen kan justeres og fikseres fra 0° til 90° og fleksion fra 0°-120° i intervaller på 10°. Et aftageligt håndstykke giver pronations- og supinationskontrol, og en skulderrem kan bruges til ekstra armstøtte. Fås til højre og venstre arm i universel størrelse. Art.nr. 20206.

✓ Formbare manchetter for en perfekt pasform



Medfølgende skulderrem kan give ekstra aflastning.

Stabil aftagelig hånddel til fiksering og begrænsning af rotation.



## Elbo 2.0 - Albueortose

Leddets justerbar helarmsortose, der bruges til postoperativ eller posttraumatisk arm- og albue-stabilisering. Det giver kontrolleret bevægelsesområde eller immobilisering med stop i bøjningsretningen fra 0° til 120° og i forlængelsesretningen fra 0° til 90°. Længden justeres med en teleskopmekanisme. Den polstrede skulderrem kan give ekstra aflastning. Ortoesen er behagelig at have på og sidder sikkert mod armen. Den fås til højre og venstre arm i en universel størrelse. Art.nr.20205.



Håndtag til neutral position kan bestilles separat.



Polstret skulderrem til aflastning medfølger.

# Størrelser og mål

## HumerusComfort & HumerusComfort Extend

Art.no	Størrelse	Omkreds	Længde
20220-00-40	S	20-27 cm	29-34 cm
20224-00-40	S Extend		32-36 cm
20220-00-50	M	25-32 cm	32-36 cm
20224-00-50	M Extend		34-38 cm
20220-00-60	L	30-40 cm	34-38 cm
20224-00-60	L Extend		36-40 cm
20220-00-70	XL	38-48 cm	36-40 cm
20224-00-70	XL Extend		38-42 cm

## CubitiComfort

Art.no	Størrelse	Overarm	Underarm	Længde
20222-09-40	Small	14-23 cm	18-26 cm	46-54 cm
20222-09-50	Medium	23-32 cm	23-32 cm	50-58 cm
20222-09-60	Large	30-39 cm	28-38 cm	52-60 cm
20222-09-70	X Large	38-50 cm	28-38 cm	52-60 cm

## Tilbehør, Axilla Kit HC

Art.no	Størrelse	Længde indre skal
20219-00-40	Small	12 cm
20219-00-50	Medium	14 cm
20219-00-60	Large	16 cm
20219-00-70	X Large	18 cm



## Tilbehør, extra lator

Art.no	Størrelse	Antal
20221-00-40	Small	4 st
20221-00-50	Medium	4 st
20221-00-60	Large	4 st
20221-00-70	X Large	4 st



## Duo

Art.no	Størrelse	Længde albue-fingerspids cm
20114-06-40	Small	35-41
20114-06-50	Medium	40-44
20114-06-60	Large	43-49
20114-06-70	X Large	48-55

## DuoTrain

Art.no	Størrelse	Længde albue-fingerspids cm
20119-06-40	Small	35-41
20119-06-50	Medium	40-44
20119-06-60	Large	43-49
20119-06-70	X Large	48-55

## SmartCuff

Art.no	Størrelse	Måtte under buste
20120-00-50	Universal	< 130 cm

## Shoulder ABDuction Pillow 15°

Art.no	Størrelse	Længde underarm
20130-00-40	S	34-38 cm
20130-00-50	M	37-43 cm
20130-00-60	L	42-48 cm
20130-00-70	XL	48+ cm

## HumerusStabil Kort

Art.no	Størrelse	Omkreds distalt	Omkreds proximalt
20211-09-40	Small	18-23	23-28
20211-09-50	Medium	23-28	28-33
20211-09-60	Large	28-33	33-38
20211-09-70	X Large	33-38	38-43

## HumerusStabil Lång

Art.no	Størrelse	Omkreds distalt	Omkreds proximalt
20210-09-30	X Small	13-18 cm	18-23 cm
20210-09-40	Small	18-23 cm	23-28 cm
20210-09-50	Medium	23-28 cm	28-33 cm
20210-09-60	Large	28-33 cm	33-38 cm
20210-09-70	X Large	33-38 cm	38-43 cm
20210-09-80	2X Large	38-43 cm	43-48 cm

## HumerusComfort Collum

Art.no	Størrelse
20225-10-50	Universal vänster
20225-20-50	Universal höger

## QuickSling

Art.no	Størrelse venstre/højre
20118-00-50	Universal

## ComfortSling

Art.no	Størrelse venstre/højre
20111-09-50	Universal

## DuoPlus

Art.no	Størrelse	Længde underarm	Bål + overarm
20113-06-40	Small	35-40 cm	60-80 cm
20113-06-50	Medium	39-44 cm	80-95 cm
20113-06-60	Large	43-48 cm	95-115 cm
20113-06-70	X Large	47-54 cm	115-145 cm

## E-motion

Art.no	Side
20206-10-50	Venstre
20206-20-50	Højre

## Elbo 2.0

Art.no	Side	Total længde
20205-10-50	Venstre	37-46
20205-20-50	Højre	37-46

## Tilbehør Håndtag (Elbo 2.0)

Art.no	Sida
20205-15-50	Venstre
20205-25-50	Højre

NordiCare Ortopedi & Rehab AB er et svensk firma, som udvikler og markedsfører omhyggeligt udvalgte ortopædiske og rehab produkter. En central del af NordiCares produktudvikling er funktion og brugervenlighed. Vores drivkraft er at udvikle funktionelle produkter i attraktivt design, der gør hverdagen lettere for både brugere og det sundhedsfaglige personale.



**NordiCare<sup>®</sup>** +

**NORDICARE ORTOPEDI + REHAB AB** • Solrosvägen 1 • 263 62 Viken, Sverige  
• [info@nordicare.se](mailto:info@nordicare.se) • +46 (0)42-35 22 20 • [www.nordicare.se](http://www.nordicare.se)