

Snabbguide Cirrus Airwalker

- 1 Ta ur polstringen och fäst kring patientens underben och fot. Tå-värmaren sitter med kardborre och kan avlägsnas vid varma perioder.



- 2 Ska kilar sättas in, lyft inlägget och placera önskat antal kilar i Cirrus, lägg sen tillbaka inlägget och tryck till. För bästa vinkel på foten används de kortaste kilarna. Dra bort det runda pappret för att fästa kilarna mot varandra. Sulans bubblor gör att inlägget sitter på plats vid användning.



- 3 Sätt i foten med polstringen i Cirrus. Behöver tå-skyddet ställas in på längden, tas foten ur igen. Vinkla upp tåskyddet och pressa ändarna inåt för att lossa tåskyddet. Tåskyddet kan även tas bort om man vill vara utan. Sätt i foten igen och fäst främre benskena mot polstringen.



- 4 Dra åt banden. Notera att vid smala ben så kan trycket mot främre skenan förbättras genom att trä in banden genom de utskärningar som finns på sidorna av ortosen.



- 5 Pumpa upp båda luftcellerna samtidigt genom att trycka på de blå pumparna. Då säkerställer du att foten centreras i walkern och inte får skav.



- 6 Vill man ta ur inpumpad luft, lyfts det runda grå locket. Tryck sedan in metallplutten så pyser luften ut.

