

DuoPlus, appliceringsguide

Liggande applicering



1. Lossa båda bandens velcroändar från armfickan innan slingan läggs ut på bädden.



2. Häng armfickan över huvudänden och lägg ut banden korsandes vid ryggen. Se till att velcron hamnar uppåt. Lägg sen patienten försiktigt ned över banden.



3. Trä armfickan över huvudet och lägg den på bröstet. Banden ska hamna över vardera axel.




4. Placera försiktigt den skadade armen i armfickan.




5. Dra båda banden runt undersidan av armfickan och upp mot axeln. Ta emot bandets drag vid axeln för lagom tryck.




6. Fäst bandets velcro där det ger armen bästa möjliga fixering och avlastning (på armfickan eller upp på banden).

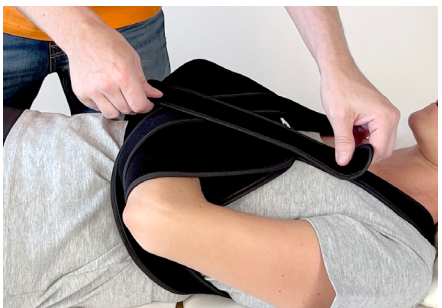

7. Banden kan fästas antingen rakt upp eller diagonalt så att de korsas framtill.

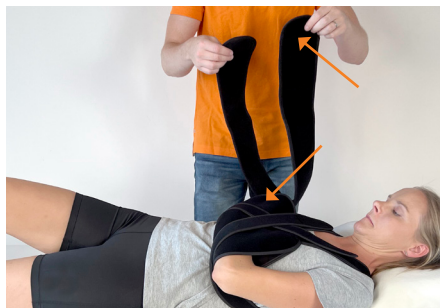


8. Fäst velcron på immobiliseringsbandets ena ände uppe på slingan just ovanför handen.

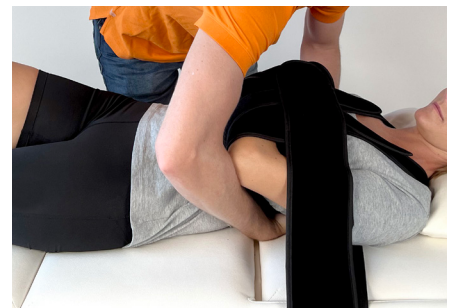


9. Trä försiktigt den andra änden utanpå den skadade armen och bakom ryggen.



10. Fäst bandet så att hand och fingrar kan röra sig fritt.

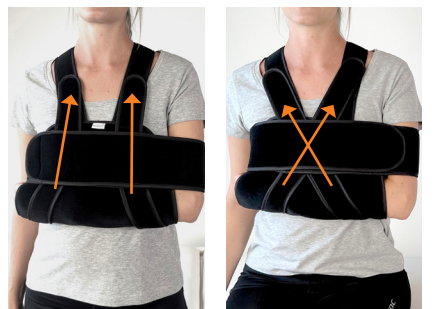

Korrekt applicering med raka respektive korsade band.

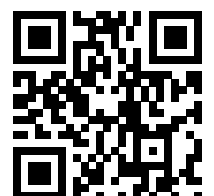

Scanna för att se instruktionsfilm med stående patient