

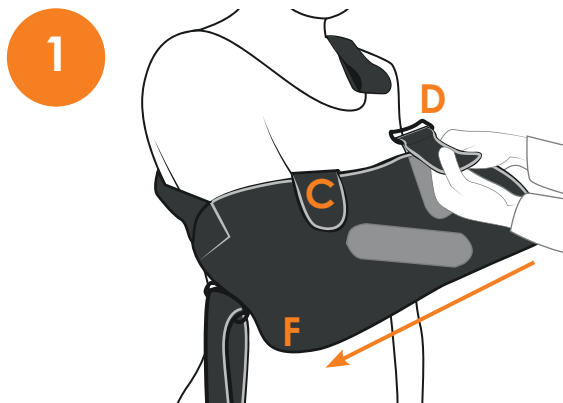


DuoTrain axellås


appliceringsinstruktion patient

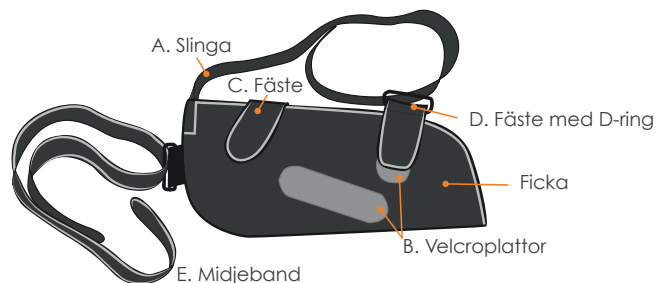

Placera den skadade armen i fickan så att armbågen vilar ända ut mot fickans bakre kant **F**. Stäng fästena **C + D**.

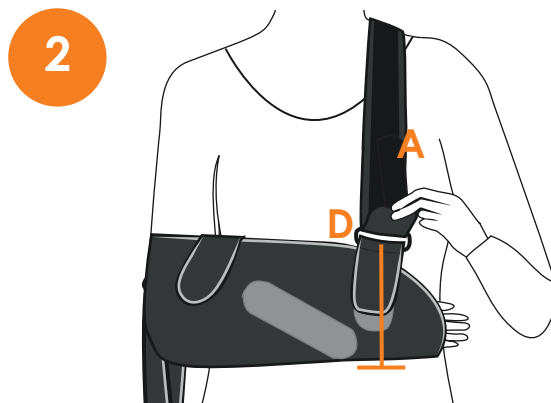


Placera slingan **A** över den friska axeln och trä genom D-ringen **D**. Se till att D-ringen sitter rakt ovanför handleden, så att handen får rätt stöd.

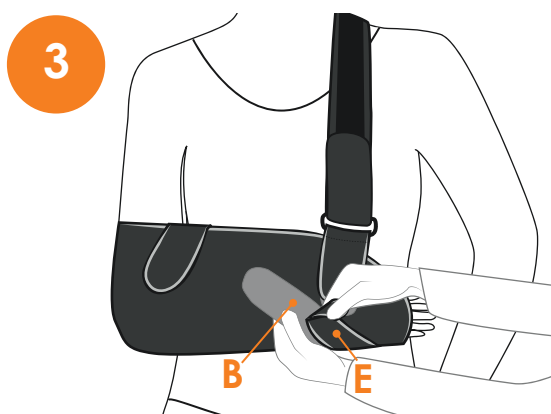

Dra midjebandet **E** bakom ryggen och fäst fram på velcro-plattan **B**.

För träning

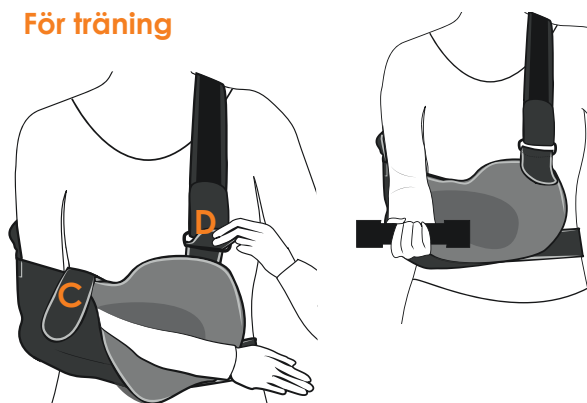

För att frigöra armen för träning, lossa **C + D** och öppna upp mitellan.

