



QuickSling Armslynge Art no. 20118-00-50

Instruktion til brugeren

Dobbelt armslynge

1. Afkortes til den ønskede længde.
2. Fastgør velcro på begge ender af båndet.
3. Lav en løkke til anvendelse i nærheden af albuen.
4. Før slyngen bagom ryggen, tilbage over den modsatte skulder.
5. Før slyngen omkring håndleddet og juster håndstilling ved at fastgøre velcro med slyngen.

Indikationer: For aflastning af skulder/arm ved akutte skader/trauma.

Kontraindikationer: For patienter med sinus caroticus syndrom bør tryk fra ortosen i sinus carotis-området undgås.

Materiale:

53% Polyuretan, 38% Polyester,
9% Nylon.
Latexfri.

