



### QuickSling Armslinga Art no. 20118-00-50

#### Instruktion till användaren

##### Dubbel armslinga

1. Klipp till önskad längd.
2. Fäst kardborre i båda ändarna på bandet.
3. Gör en ögla för applicering nära armbågen.
4. För slingan bakom ryggen över motsatt axel.
5. Linda slingan runt handleden och justera handens läge genom att fästa kardborren mot slingan.

**Indikationer:** För avlastning av skuldra/arm vid akuta skador/trauma.

**Kontraindikationer:** Undvik tryck av ortosen över sinus carotis-området för patient med risk för sinus caroticus-syndrom.

##### Material:

53% Polyuretan, 38% Polyester, 9% Nylon.  
Latexfri.

