
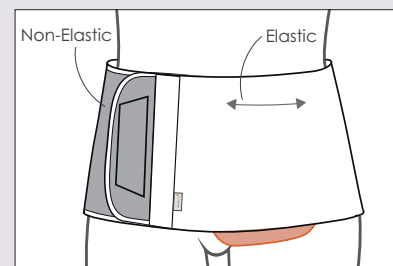
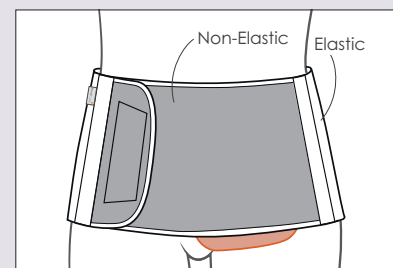


StomiSoft, joustava avannetukivyö

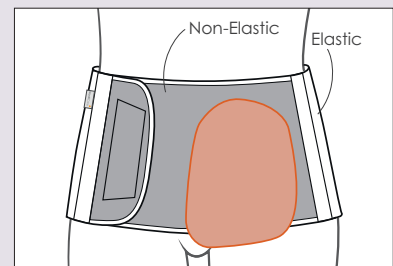

NordiCare[®] 

StomiSoft, joustava avannetukivyö

- Joustava avannevyö, joka tukee miellyttävästi avannetta tai tyrää.
- Tarranauha voidaan kiinnittää mihin tahansa kohtaan joustamattomassa etuosassa.
- Joustamattomaan etuosaan voidaan leikata aukko.
- Tukivyö on käännettävä, joten se sopii käytettäväksi oikealla tai vasemmalla puolella olevan avanteen kanssa.
- On saatavana mustana, korkeus 16 ja 20 cm.
- Lateksiton ja OEKO-TEX®-sertifioitu




Koko	Mitta (cm)	Korkeus 16 cm	Korkeus 20 cm
XS	70-85 cm	50219-00-30	50218-00-30
S	80-95 cm	50219-00-40	50218-00-40
M	90-105 cm	50219-00-50	50218-00-50
L	100-115 cm	50219-00-60	50218-00-60
XL	110-125 cm	50219-00-70	50218-00-70
2XL	120-135 cm	50219-00-80	50218-00-80

Mittaus


Ympäryysmitta kohdasta, johon tukivyö tulee. Katso taulukosta oikea koko.

Yksi tukivyö – kolme erilaista käyttötapaa


Joustamattomaan etuosaan voidaan leikata aukko. Aukko leikataan avannesidokselle sopivan kokoiseksi. Etuosa ei rispaannu, leikattiinpa siihen minkä muotoinen ja kokoinen aukko tahansa. Ompeleminen ei siis ole tarpeen. Tukivyötä voidaan käyttää yhtä hyvin ilman aukon leikkaamista. Jos avannepussin päälle halutaan enemmän kompressiota, tukivyö puetaan päälle siten, että pussi jää joustamattoman materiaalin alle.

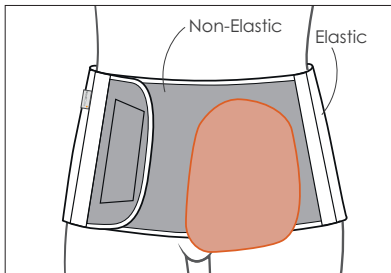

Leikattava avanneaukko.

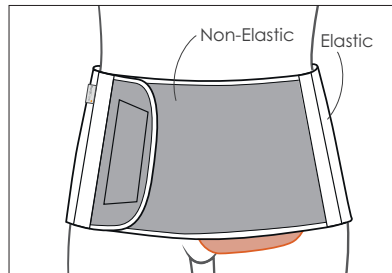

Kun halutaan enemmän tukea, joustamaton osa tulee eteen.
Kun halutaan vähemmän tukea, joustava osa tulee eteen.

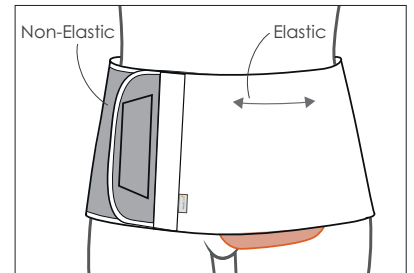

Kun halutaan vähemmän tukea, elastinen osa laitetaan pussin päälle.



Latex-free

MD Class I

