
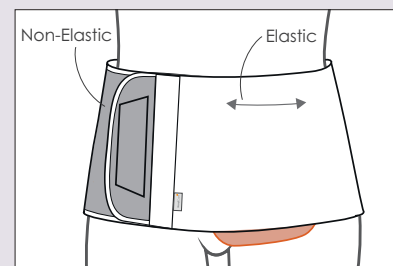
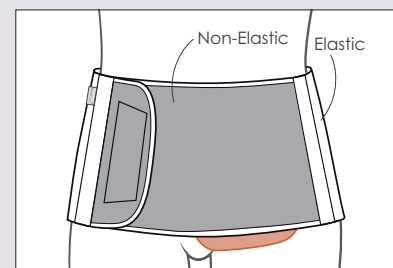


# StomiSoft, fleksibelt brokkinde

BLÅ RESEPT

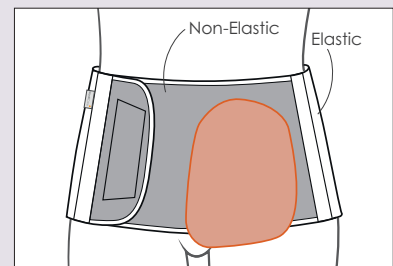

**NordiCare**<sup>®</sup> +

# StomiSoft, fleksibelt brokkinde

BLÅ RESEPT

- Rett, elastisk støttebelte for bruk ved stomi eller stomibrokk.
- Enkelt å feste og justere takket være håndtak og borrelås i fronten.
- Det kan klippes hull i det uelastiske frontpartiet.
- Beltet kan snus, slik at det passer både på høyre og venstre side ved stomi.
- Latexfri og OEKO-TEX®-sertifisert.
- Tilgjengelig i to høyder, 16 og 20 cm.



	Omkretsmål	16 cm, art.nr	16 cm Helfo. Vare-nr.*	20 cm, art.nr	20 cm Helfo. Vare-nr.
XS	70-85 cm	50219-00-30	849756	50218-00-30	932721
S	80-95 cm	50219-00-40	865359	50218-00-40	952237
M	90-105 cm	50219-00-50	898250	50218-00-50	917705
L	100-115 cm	50219-00-60	869159	50218-00-60	928751
XL	110-125 cm	50219-00-70	977687	50218-00-70	993412
2XL	120-135 cm	50219-00-80	820578	50218-00-80	906785


\*StomiSoft 16 vil være tilgjengelig på Helfo fra 1/1 2021.

## Mål


Omkretsmål rundt overkroppen ved tenkt plassering i cm. Følg måletabellen for å finne rett størrelse.

## Et belte – tre forskjellige måter å bære på


Det kan klippes hull i det uelastiske frontpartiet. Klipp hull i ønsket størrelse i forhold til stomibandasjen. Frontpartiet frynser ikke uansett form og størrelse på hullet. Ikke nødvendig med søm. Beltet kan brukes like godt med eller uten klippet hull. Dersom man vil ha stomiposen strammere, lukkes støttebeltet slik at posen ligger under det uelastiske materialet. For at stomiposen enkelt skal kunne ekspanderes, kan beltet snus slik at posen isteden ligger under det elastiske materialet.

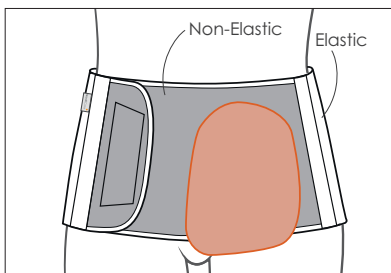

Med klippet hull for stomibandasjen.

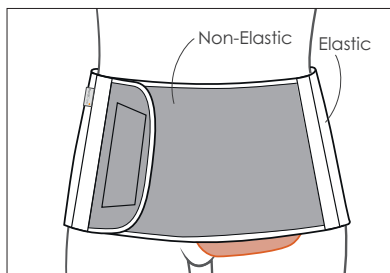

Med mer press, uelastisk støtte over stomibandasjen.

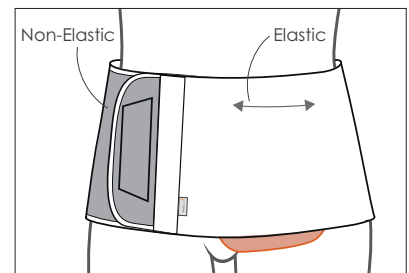

Med myk elastisk støtte over stomibandasjen.



Latex-free

MD Class I

