

H/S Elliptosphere™



Kateter för Hydrosonografi och Hysterosalpingografi

Bruksanvisning

- Latexfri ballongkateter, införingshylsa med 1,5 cc spruta.
- Använd luft eller NaCl.
- Katetern kan användas med vatten eller oljebaserat kontrastmedel.
- Steril för engångsbruk.

Indikation

För administrering av kontrast under Hydrosonografi eller Hysterosalpingografi, för att upptäcka patologiska fynd i uterus och äggledare.

Kontraindikation

Sedvanlig medicinsk bedömning.

Försiktighet!

Överskrid inte rekommenderad uppblåsning av ballongen 1,5 cc, då finns risk att ballongen kan spricka.

Varning!

Vissa patienter kan vara känsliga för kontrast.

Instruktion


1. Fatta tag om den ljusblå kateterns platta trekant och dra bort skyddshylsan från kateterns spets.
2. Testa ballongen genom att tömma sprutan upp i ballongen.
3. Dra därefter tillbaka luften i sprutan fullständigt och stäng kranen.
4. Koppla på den kontrastfyllda sprutan till den blå luerlock-fattningen och fyll katetern med kontrast, så att all luft försvinner.
5. Skjut upp införingshylsan till ca 0,5 cm från kateterns spets. Placera därefter katetern mot cervixkanalen.
6. Öppna kranen till sprutan och fyll ballongen upp till max 1,5 cc med alternativt luft eller NaCl. Stäng kranen.
7. Spruta in kontrasten och genomför undersökningen.
8. Om man önskar placera ballongen i uterus, töm ballongen åter ned i sprutan. Ändra kateterns läge till uterus och återfyll ballongen. Stäng kranen.
9. Dra sedan katetern ned och täpp till mot cervixkanalens öppning. Fortsätt undersökningen.

Borttagning av katetern

Öppna kranen och töm ballongen åter ned i sprutan. Dra ut katetern.

Elliptosphere Ballong

Den patenterade formen på ballongen gör det möjligt att efter insättning dra tillbaka katetern längre än andra runda H/S katetrar. Det innebär att man får en bättre översikt i hela uterus vid hydrosonografi. Se bild nedan.

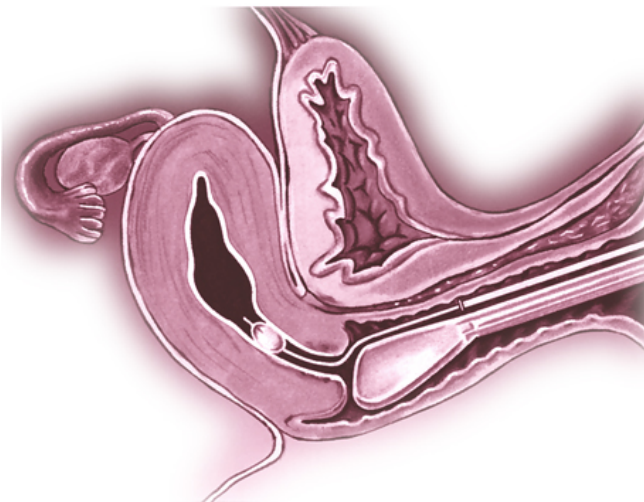

Art.nr

Benämning

61-4005

H/S Elliptosphere Kateter, 5 Fr, (10 st/fp)

CooperSurgical