




GINRAM®
Sterila gynekologiska produkter

Spiralutdragare

Artnr:770123

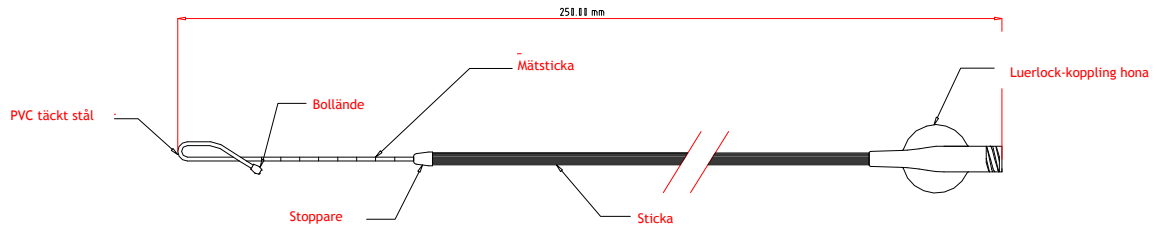

SE

Bruksanvisning

Innan man börjar använda instrumentet af instrumentet är det bra att scanna av spiralens placering via ultraljud av livmoderkanalen.

Genomför en noggrann vaginalundersökning.

Decinficera livmodermunnen noga

- a) Utför hysterometri med en rak hysterometer eller en böjd hysterometer vid bakåtböjd livmoder alternativt accentuerad, famåtböjd livmoder (Det kan då bli nödvändig att använda en livmoderhalstång på livmodermunnen.
- b) Sätt försiktigt in spiralutdragaren, tills inställd hysterometri uppnåtts, samtidigt ges en försiktig rotation medurs: detta förenklar introduktionen och undviker vävnadsskador.
- c) När man befinner sig i närheten av livmodermunnen görs en rörelse moturs, detta förenklar kopplingen till spiralen.
- d) Dra försiktigt tillbaka instrumentet, tills man i närheten av livmodermunnen ser utdragssnören eller delar av spiralens hårda kärnstruktur.
- e) Sluta dra i utdragaren!
- f) Använd en tång som fäster i utdragssnöret eller spiraldelen och fullgör utdragandet.

Notera: Läs instruktionerna innan användning. Återanvänd inte. Får endast användas om förpackningen är oskadd. Ska användas omedelbart efter öppning av förpackningen. Får endast användas av utbildad personal.

Använd inte instrumentet om: tidigare myomektomi-ingrepp eller multipla hysterotomier , markerat framåtböjd eller bakåtböjd livmoder, tillstånd av inflammationsprocess



Solann AB
Uddnåsvägen 23
176 76 JÄRFÄLLA
SWEDEN
+46(0)8 583 560 60 - www.solann.se