

Kap 13.3 Att fylla med Powerfiller


Power Filler underlättar fyllningen av pumpar med spruta. Den ska steriliseras före användning och är återanvändningsbar.

Koppla Power Fillern till spruta:

1. Trä Power Fillern över en 60 ml spruta och dra ner den till botten av sprutan.
2. Fyll sprutan med läkemedel/lösning.
3. Håll i Power Fillern under påfyllning av sprutan för att undvika att den glider av.


Fyllning av pump:

1. Stäng slangklämman*.
2. Skruva av hatten till påfyllningsventilen, spara hatten
3. Skruva fast den fyllda sprutan.
4. Håll sprutan så att kolven vilar på plant underlag.
5. Fatta ett stadigt tag på Power Fillern med båda händerna tryck nedåt medan läkemedlet/lösningen injicerats i pumpen.
6. Upprepa vid behov.

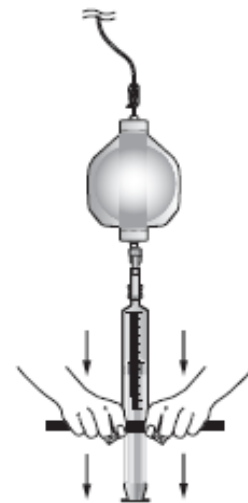

Fyllning av pump med förlängningsset

1. Koppla sprutan till förlängningsset.
2. Anslut det primade (fyllda) förlängningssetet till pumpen.
3. För att fylla pumpen följ instruktionerna ovan.

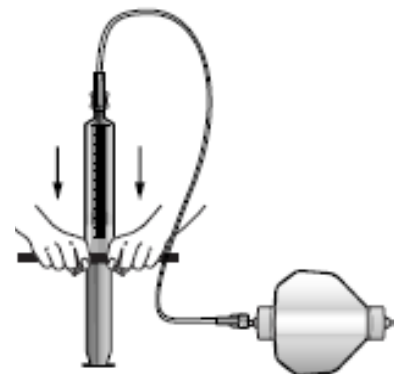

Notera: Förlängningssetet bör vara anslutet till pumpens påfyllningsventil tills fyllningen är klar.

*Om slangklämman är öppen, riskeras filtret att vätas ojämnt. Det kan leda till att en luftbubbla fastnar i flödeskapillären och stoppar flödet.

Se kap 13.1: *Vid problem.*