

Kap 23 Att fylla pumparna

För fyllning av ON-Q pumpar på apotek

Se även *Fyllnadsanvisningar kap 13.1*

Pumpar, katetrar, tunnelörer och fyllnadssprutor ligger packade i flera påsar som ligger tillsammans i en stor påse. Öppna ytterpåsen, ta fram förpackningen med pumpen i.

Fyll pumpen med validerad aseptisk teknik och lägg tillbaka den tillsammans med de andra påsarna i den stora ytterpåsen innan den levereras.



För fyllning vid operation



Förberedelser

1. Täck ytan med en sterilduk
2. Ta fram 60 ml sprutan (finns i fp med pumpen)
3. 18 gauge nålar el adaptorer
4. 70 % isoproylalkohol (IPA) dukar, individuellt paketerade
5. Standardutrustning: handskar, munskydd, lab. rock, hårskydd
6. Desinfektionsmedel
7. Lokalanestetika och NaCl



Fyllning av pump:


1. Dra upp infusionslösningen i medföljande 60 ml spruta
2. Skruva av hatten till fyllnadsporten, spara hatten.
3. Skruva fast den fyllda sprutan.
4. Stäng slangklämman*.
5. Håll sprutan mot underlaget enl. bild, tryck nedåt för att fylla pumpen. Skruva loss sprutan och upprepa vid behov till önskad volym.
6. Skruva loss sprutan och sätt på hatten.
7. Skruva av ändroppen, öppna slangklämman, prima (fyll) slangen. Stäng slangklämman och sätt på ändroppen.
8. Pumpen är klar för att användas.

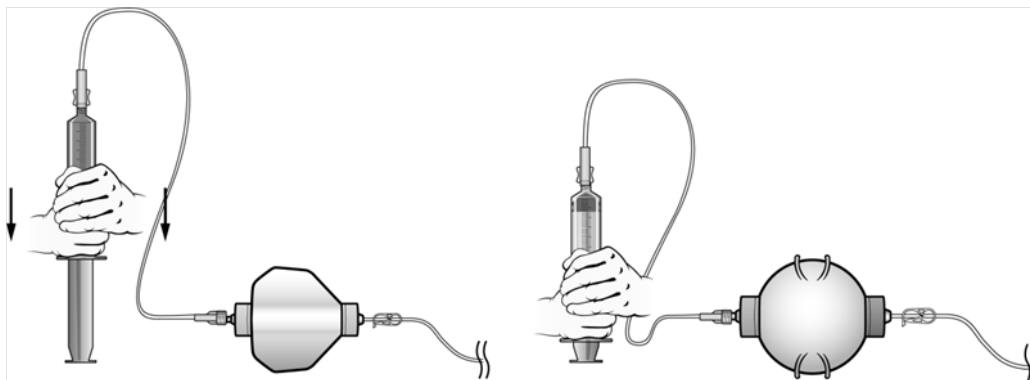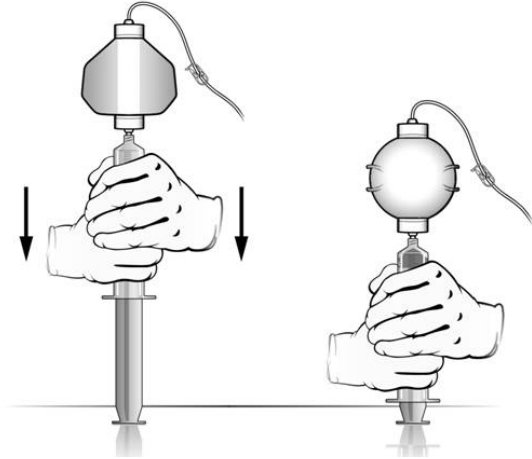

Vid fyllning av de största pumparna (400 ml) medföljer ett slangset som underlättar fyllningen. Den kopplas mellan sprutan och pumpen.

Powerfiller

Det är trögt att fylla pumparna, framförallt i början. Powerfiller är ett enkelt hjälpmedel som förenklar fyllningen. Den träs över sprutan så att man får mera kraft vid fyllningen.

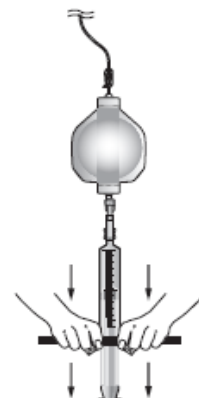

*Om slangklämman är öppen vid fyllning, riskeras filtret att vätas ojämnt. Det kan leda till att en luftbubbla fastnar i flödeskapillären och stoppar flödet.