

## Kap 26 Kemisk stabilitet i ON-Q pumpar

Substans Läkemedelsnamn	Koncentration	Lösning	Rumtemp.	Kyl	Frys	Ref.
Bupivacain HCL Marcaïn®	2,5 & 5 mg/ml 0,625 - 5 mg/ml	NaCl/RTU	30 dygn 45 dygn	-	-	31 HH
Bupivacain HCL/ Methylparaben	2,5 & 5 mg/ml 1 mg/ml		30 dygn			36
Ropivacain Narop®	2 mg/ml 2 & 7,5 mg/ml 1 - 5 mg/ml	NaCl/RTU	30 dygn 14 dygn 45 dygn	-	-	31 30 HH
Levobupivacain Chirocaine®	2,5 mg/ml 5 mg/ml		30 dygn <sup>2</sup>			37
Bupivacain HCL/ Ceftriaxone	3,7 mg/ml ab.		48 h	-	-	32
Bupivacain HCL/ Cefazolin	3,7 mg/ml ab.		72 h	-	-	32
Bupivacain/ Dexamethasone	0,4 mg/ml		5 dygn	7 dygn	-	34
Bupivacain/ Ketorolak	1 mg/ml <sup>1</sup>			7 dygn		33
Bupivacain/ Ketorolac/ Morfin	5 mg/ml 0,24 mg/ml 0,032 mg/ml		5 dygn	9 dygn		35
Ropivacain/ Ketorolak	1 mg/ml <sup>1</sup>			7 dygn		33
Lidocain Xylocain®	10 mg/ml		30 dygn	-	-	31
Morfin HCL Spasmofen®	10-40 mg/ml	RTU*	6 v.	6 v.	-	5
Morfin SO <sub>4</sub> Dolcontin®	20 mg/ml	NaCl	7 dygn	-	-	3

<sup>1</sup>Ketorolak kan få utfällningar som stoppar pumpen, använd därför inte andra koncentrationer av Ketorolak än de som rekommenderas här utan att undersöka att det fungerar först.

<sup>2</sup> +24 h 37°C

Små pumpar (<125 ml) tillverkas nu i ett silikonmaterial och har nya stabdata. Dessa redovisas med blå text.

Ref. Data on file. Kontakta Solann AB för mer information