




A KIMBERLY-CLARK HEALTH CARE COMPANY

ON-Q* Catheter *Patient Guidelines*

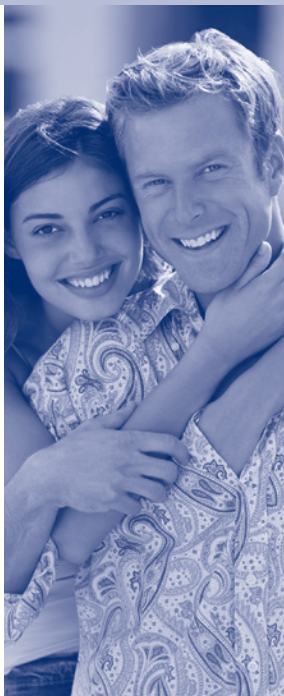

ON-Q*
PAIN RELIEF SYSTEM


BESKRIVNING: Katetern är en smal slang nära hudsnittet som är kopplad till din infusionspump. Katetern kan vara guldfärgad eller genomskinlig.

AVLÄGSNANDE AV KATETER

Om läkaren har instruerat dig att avlägsna katetern följer du **anvisningarna** och tänker på dessa viktiga steg:[†]

- Avlägsna förbandet som täcker kateterstället.
- Ta bort alla självhäftande remsor från huden.
- Fatta tag i katetern nära huden och dra **varsamt** i katetern. Det ska gå lätt och vara smärtfritt att avlägsna den. Vid avlägsnandet får du inte rycka eller dra snabbt. Om det är svårt att ta ut den eller om den töjs ska du **SLUTA**. Kontakta läkare. Kontinuerlig dragning kan orsaka att katetern går sönder.
- Skär **inte** och dra **inte** hårt när du ska avlägsna katetern.
- **⚠ VARNING:** När du avlägsnat katetern ska du söka efter den svarta markeringen på kateterspetsen för att säkerställa att hela katetern avlägsnats. Kontakta läkare om du inte kan se någon svart markering.
- Placera ett bandage över kateterstället enligt läkares instruktion.

[†] Om du har mer än en kateter ska du upprepa samma steg för det andra kateterstället.

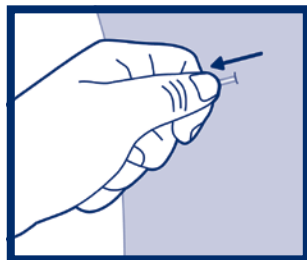

⚠ WARNING: Följande symptom eller situationer kan utgöra ett allvarligt medicinskt tillstånd. Stäng klämman på pumpslangen omedelbart och kontakta din läkare för att förhindra allvarlig patientskada.

- Förvärrad smärta
- Rodnad, värme, läckage eller häftig blödning från kateterstället
- Smärta, svullnad eller ett stort blåmärke runt kateterstället
- Yrsel, virrighet
- Dimsyn
- Ringningar eller surr i öronen
- Metallsmak i munnen
- Känsellöshet och/eller stickande känsla runt mun, fingrar eller tår
- Sömnighet
- Förvirring
- Andra biverkningar: _____

KÄNSELLÖSHET

Var medveten om att du kan erfara känsellöshet runt stället för det kirurgiska ingreppet. Om så är fallet ska du vidta lämpliga åtgärder för att undvika skador. Iaktta försiktighet när varma eller kalla föremål placeras på en känslös extremitet.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Återanvänds inte.
- Skydda pumpen och kateterstället från vatten enligt läkares instruktioner.

För mer information, ring +1.949.206.2700 • 1.800.444.2728 eller gå in på www.myON-Q.com för vår nyaste produktinformation.