

# Mityvac Mystic II Mushroom Cup

## Sugklocka för engångsbruk



### M-style Mushroom cup

Har ett integrerat pump- och cup-system, packat och steriliserat för omedelbar användning.

### Indikationer

Sedvanliga medicinska indikationer för assisterad förlossning med sugklocka.

Assistans med sugklocka skall endast utföras av läkare.

### Förberedelse för sugklockan

- Barnets ålder
- Fostervattenavgång
- Tömd urinblåsa hos modern.
- Positionen på barnets huvud.
- Cervix retraherad.

### Generell instruktion


**Test av systemet:** Pressa cupen mot handflatan på din hand med handske och anbringa vakuum. Nålen på mätinstrumentet skall kvarstå inom mätavslans 0-box (fyrkanten), när vakuum inte är applicerat.

*Använd inte denna sugklocka, om nålen inte kvarstannar inom 0-box (fyrkanten) efter test!*

*Använd inte systemet om det är svårt att applicera cupen rätt.*

### Applicering av cupen

1. Torka av barnets huvud.
2. Böj cupen i 90° mot skaftet. Med skaftet i böjd position, håll cupen med ett finger (se bild). Skaftet skall vara parallellt med handflata och handled. Placera därefter cupen genom att för den nedåt, inåt mot barnets huvud.
3. Anbringa den på barnets huvud på området mellan bakre fontanelen och ca 3 cm bakåt från främre fontanelen med sutura sagitalis mitt under cupen. Kontrollera med fingret att cupen är placerad rätt.

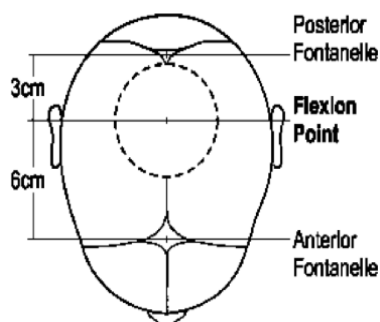

### Varning!

- Överstig inte rekommenderat undertryck för vakuum.
- Applicera aldrig cup med vakuum i barnets ansikte.
- Om assistans med sugklocka ej ger resultat, avbryt försöket.
- **Avbryt assistansen med sugklocka:**
  - a) Om cupen släpper vid 3 tillfällen.
  - b) Om vertex ej kommit fram mer vid varje dragning.
  - c) Trauma på barnets huvud.
  - d) Tiden för vakuumentraktionen överstiger 10 minuter.

### Start av vakuumentraktion

1. Påbörja vakuum med att höja undertrycket till 10 mm Hg (gult fält på mätartavlan).
2. Kontrollera återigen cupens placering på huvudet.
3. Höj raskt till 38-58 mm Hg (grönt fält på mätartavlan), ca 4-5 tryckningar i handtaget.
4. Påbörja därefter dragningen under kontraktion och i pelvis axel. *Överträd inte rekommenderad vakuumnivå.*
5. När kontraktionen inte längre är effektiv, reducera vakuum till 10 mm Hg (gult fält) genom att långsamt trycka reduktionsknappen framåt och invänta nästa kontraktion. *Reduktionsknappen är vit och sitter framför mätinstrumentet. Den hanteras lätt från båda sidorna av handtaget.*
6. Fullfölj förlossningen med sedvanlig medicinsk bedömning.
7. Kontrollera barnets tillstånd efter förlossningen.



# Mitvac Mystic II Bell Cup

## Sugklocka för engångsbruk

### MitySoft Bell cup

Har ett integrerat pump- och cup-system, packat och steriliserat för omedelbar användning.

### Indikationer

Sedvanliga medicinska indikationer för assisterad förlossning med sugklocka. Assistans med sugklocka skall endast utföras av läkare.

### Förberedelse för sugklockan

- Barnets ålder
- Fostervattenavgång
- Tömd urinblåsa hos modern.
- Positionen på barnets huvud.
- Cervix retraherad.


### Generell instruktion

1. Ta bort det blå skyddet på cupen
2. Testa systemet: Pressa cupen mot handflatan på din hand med handske och anbringa vakuum. Nålen på mätinstrumentet skall kvarstå inom mättavlans 0-box (fyrkanten), när vakuum inte är applicerat.

*Använd inte denna sugklocka, om nålen inte kvarstannar inom 0-box (fyrkanten) efter test!  
Använd inte systemet om det är svårt att applicera cupen rätt.*

### Applicering av cupen

1. Torka av barnets huvud.
2. Pressa samman cupen och anbringa den på barnets huvud på området mellan bakre fontanelen och ca 3 cm bakåt från främre fontanelen med sutura sagitalis mitt under cupen. Kontrollera med fingret att cupen är placerad rätt.

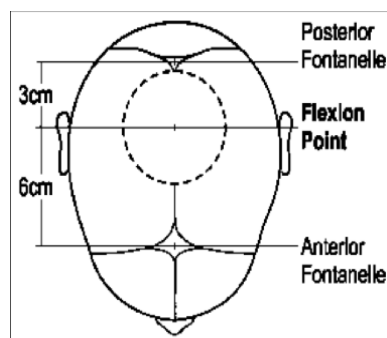

### Varning!

- Överstig inte rekommenderat undertryck för vakuum. Applicera aldrig cup med vakuum i barnets ansikte.
- Om assistans med sugklocka ej ger resultat, avbryt försöket.
- *Avbryt assistansen med sugklocka:*
  - a) Om cupen släpper vid 3 tillfällen.
  - b) Om vertex ej kommit fram mer vid varje dragning.
  - c) Trauma på barnets huvud.
  - d) Tiden för vakuumentraktionen överstiger 10 minuter.

### Start av vakuumentraktion

1. Påbörja vakuum med att höja undertrycket till ag är på resande fot i morgon och på fredag men du kan gärna prova att nå mig/telefon om du önskar. (jag ser inte ditt telefonnummer här) 10 mm Hg (gult fält på mättavlan).
2. Kontrollera återigen cupens placering på huvudet.
3. Höj raskt till 38-58 mm Hg (grönt fält på mättavlan), ca 4-5 tryckningar i handtaget.
4. Påbörja därefter dragningen under kontraktion och i pelvis axel. *Överträd inte rekommenderad vakuumnivå.*
5. När kontraktionen inte längre är effektiv, reducera vakuum till 10 mm Hg (gult fält) genom att långsamt trycka reduktionsknappen framåt och invänta nästa kontraktion. *Reduktionsknappen är vit och sitter framför mätinstrumentet. Den hanteras lätt från båda sidorna av handtaget.*
6. Fullfölj förlossningen med sedvanliga medicinsk bedömning.
7. Kontrollera barnets tillstånd efter förlossningen.

