

Activon Manukahonung



Sårbehandling...
den naturliga vägen

Activon Tulle®

Kompress med Manukahonung

Produktbeskrivning

Activon Tulle är en viskos kompress mättad med 100% Manukahonung. Activon Tulle skapar en fuktig sårhelingsmiljö, tar bort odör samt har en antiseptisk effekt. Lämpligt för ytliga eller granulerande sår samt för debridering eller upprepning av nekrotiskt eller oren vävnad.

Bruksanvisning

Öppna förpackningen. Ta ut kompressen och placera förbandet över såret. Täck med lämpligt förband ex. Eclipse beroende på exudatmängd. Förvaras i rumstemperatur. Vid kraftigt infekterade sår kan Activon Tulle kombineras med extra Manukahonung med Activon tube



Användningsområde

- Bensår
- Trycksår
- Illaluktande sår
- Maligna tumörsår
- Torra, orena eller nekrotiska sår

Fördelar

- Antiseptiskt
- Antiinflammatoriskt
- Minskar odör
- Osmotisk effekt
- Bibehåller en fuktig sårhelingsmiljö
- Fastnar inte i såret



Orderinformation

| Artnr | Beskrivning | Storlek | Avd.förp |
|---------|---------------|---------|----------|
| CR 3761 | Activon Tulle | 5x5cm | 5st |
| CR 3658 | Activon Tulle | 10x10cm | 5st |
| CR 3830 | Activon Tube | 25 gram | 12st |

