

1

Hoven förbereds, verkas och anpassas som vanligt.

När det ska väljas en passande skostorlek, är det viktigt att inte välja en för liten storlek.

2

Se till att strålen har kontakt till skons heartbar under belastning. Om nödvändigt kan man stödja med silikonpackning från EQUIMIX eller VETTEC

3

Skon har en stigning i tå-området, och därmed filas en fördjupning i samma storlek och vinkel för att placera skons uppresta tå.

4

När skon ska anpassas till hoven avlägsnas överskottsmaterial från skon. Detta görs med en fil eller slipmaskin.



5

Var uppmärksam på att inte ta bort för mycket material, detta för att undvika att söm kanalerna öppnas. Där ska minimum vara 2 mm för att försäkra materialets stabilitet.

6

På bilden ser vi skon anpassas med en 45 graders avrundning, som förhindrar att hästen träder ur skon.




7

Innan skon sätts på med söm är det viktigt att anpassa clipssystemet som stabiliserar skon. **Vi rekommenderar att clipssystemet används.**

8

Sömmarna sätts på i följande ordning, innan sidoclipsen monteras:
Först hamras det i nr. 1, därefter 2, som visat på bilden. Bemärk att det vid varje håll befinner sig tre söm kanaler – så välj det som passar bäst.

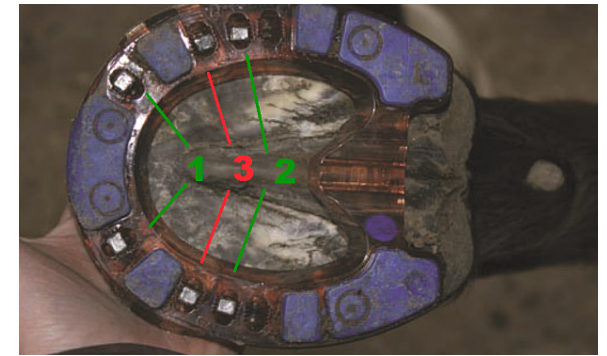

9

Med en hovklinga skärs det en liten flik av hoven på varje sida, dit sidoclipsen ska fästas.
Sidoclipsen slås i och det kontrolleras att de sitter ordentligt i fördjupningen och helt in till hovväggen.
Först efterföljande nitas sömmarna igenom clipsen i håll 3.

10

Avslutningsvis är det ett **MÅSTE** att alla sömmar slås ca. 1 mm ned i söm kanalerna. Se bild.

Skoningen färdiggörs herefter som vanligt.

