

Ultimate Tandblekning

Instruktioner

Tack för din order!

Du har fått ett tandblekningpaket innehållande, Tandblekningspenna, Tandblekningstandkräm, Tandblekningsmunspray, BlueLight - Plasmaljus och en Tandkarta för att jämföra nyanserna på dina tänder. Alla produkterna har olika funktioner och du använder de i följande ordning.

Tandblekningspennan (huvudprodukt): Använd morgon och kväll efter tandborstning under 14 dagar. Skruva på pennans botten för att gel ska komma upp till toppen, pensla därefter ett tunt lager gel på dina tänder. tt därefter på **BlueLight** (glöm inte ta bort plasten under batterierna) och sätt in den i munnen mot dina tänder och låt vara i 20-30 minuter. Därefter kan du skölja munnen.

Tandblekningstandkrämen och **Tandblekningsmunsprayen** använder du under och efter din behandling med Tandblekningspennan för att hålla dina tänder vita så långt tid som möjligt efteråt. Desutom ger dem dig en fräsch andedräkt om håller hela dagen samt skyddar mot extra beläggningar.

Tandkartan använder du innan du börjat din behandling och jämför därefter med resultaten du fått efter 14 dagar. Resultaten är såklart olika från person till person men de flesta kunder brukar få mellan 1-4 nyanser vitare tänder på 14 dagar. Finns det mer gel i pennan efter 14 dagar kan man använda pennan några dagar extra för ännu bättre resultat!

Lycka till med din Tandblekning!

Vänligen

White One®

WHITE **1**NE

Artikelnummer: 07350080400591